

## 用户指南：

# 使用 PARI LCD 简易喷雾器 进行雾化治疗



1

在每个吸入疗程前先彻底清洁双手。



2

要组装喷雾器，请小心地将喷嘴附件插入喷雾器下段。顺时针轻轻扭动喷嘴附件，将其锁定到位。



3

确保上段笔直（而不是倾斜）插入喷雾器下段。



4

倒入吸入溶液。



5

连接口含器或面罩。使用面罩时，请阅读简易喷雾器使用说明。



6

使用连接管连接简易喷雾器和压缩机。将压缩机连接到主电源。



7

以放松的姿势坐直并打开设备。



8

将口含器含在牙齿之间，并用嘴唇把它封住。注意不要遮蔽口含器两侧的呼气窗



9

通过口含器慢慢地深吸气，然后以放松的方式呼气。简易喷雾器发出不同的噪音表明喷雾已完成。治疗结束时，喷雾器中会留有一些残留液体。



10

关闭设备。从连接管断开简易喷雾器。在每个吸入疗程后干燥连接管：

- 将连接管连接到压缩机。
- 打开压缩机。
- 让压缩机继续工作，直到流过连接管的空气清除掉连接管中的所有冷凝痕迹。



11

断开电源插头。

## 用户指南：

# 使用 PARI LCD 简易喷雾器 进行雾化治疗



1

每次使用后拆卸简易喷雾器。完成治疗后，立即将所有部件用流动饮用水简单冲洗一下，然后将所有拆开的组件放入含有少量洗洁精的温饮用水中约 5 分钟，然后在流水中彻底冲洗所有部件。



2

每天用沸水对简易喷雾器 5 分钟，或用标准商用消毒剂（例如专为婴儿奶瓶设计的消毒剂）消毒至少 6 分钟。



3

每次清洁和/或消毒后，将部件放在干燥、干净、吸水的表面上，并让其完全干燥。



4

将所有组件存放在干燥、无尘的地方。

请注意，出于安全卫生考虑，简易喷雾器及其组件都只能由单个患者使用。至少每15次吸入疗程后，更换简易喷雾器一次，否则将不再保证安全卫生要求、性能参数和安全治疗。

请确保阅读喷雾器和压缩机附带的使用说明，其中将提供比本简短指南详细得多的说明。设备包中包括说明手册。如果丢失，您可以从 <https://www.pari.com/cn-cn/home/> 下载手册

