

# 用户指南：使用 PARI LC SPRINT® 进行雾化治疗

(适用于：PARI LC SPRINT、PARI LC SPRINT Junior、PARI LC SPRINT Star)



**1**  
在每个疗程前先彻底清洁双手。



**2a**  
要组装喷雾器，请先将喷嘴放在喷雾器下段。然后应添加喷雾器上段并顺时针转动以将两段锁在一起。将口含器或面罩连接到喷雾器。



**2b**  
如果使用婴儿面罩，它只能与婴儿弯管配合使用。根据婴儿或幼儿的位置调整弯管的对齐并放置面罩。



**3**  
使用连接管连接喷雾器和压缩机。将压缩机连接到电源。



**4**  
打开喷雾器盖。倒入吸入溶液。关闭喷雾器盖。



**5a**  
以放松的姿势坐直并打开设备。将口含器含在牙齿之间，并用嘴唇把它封住。



**5b**  
对于幼儿，确保喷雾器直立。轻轻地将面罩贴在脸上，使其贴合。



**6**  
慢慢地深吸。如果您的喷雾器配有 PIF 控制，您在吸气太快时会感到阻力。如果您注意到这一点，请暂停片刻，然后尝试更缓慢地吸气。

当喷雾器发出不同的噪音时（它会从平稳的嘶嘶声变成啉啉声），这表明雾化治疗已完成。治疗结束后，一些残留液体会留在喷雾器中。



**7**  
在每个吸入疗程后干燥连接管：

- 将连接管连接到压缩机。
- 打开压缩机。
- 让压缩机继续工作，直到流过连接管的空气清除了连接管中的所有冷凝痕迹。



**8**  
断开电源插头。

# 用户指南： 使用 PARI LC SPRINT® 进行雾化治疗



1 每次使用后拆卸喷雾器。完成治疗后，立即将所有部件用流动饮用水简单**冲洗**一下，然后将所有拆开的组件放入含有少量洗洁精的温饮用水中约 5 分钟，然后在流水中彻底冲洗所有部件。



2 每天用沸水对喷雾器**消毒** 5 分钟，或用标准商用消毒剂（例如专为婴儿奶瓶设计的消毒剂）消毒至少 6 分钟。



3 每次清洁和/或消毒后，将部件放在干燥、干净、吸水的表面上，并让其完全**干燥**后再使用。



4 将所有组件**存放**在干燥、无尘的地方。



5 空气过滤器、喷雾器和连接管应每年**更换**一次。

请确保阅读喷雾器和压缩机附带的使用说明，其中将提供比本简短指南详细得多的说明。设备包中包括说明手册。如果丢失，您可以从 <https://www.pari.com/cn-cn/home/> 下载手册

