



Gebrauchsanweisung

Bitte aufmerksam lesen.

PARI ProtECT®

Hals- und Rachenspray

Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray beginnen. WERFEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG NICHT WEG! Sie enthält wichtige Informationen. Wenn Sie Fragen zu PARI ProtECT Hals- und Rachenspray haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder den Vertreter.

Was ist PARI ProtECT Hals- und Rachenspray und wofür wird es angewendet?

PARI ProtECT Hals- und Rachenspray ist ein Medizinprodukt, das Ectoin®, ein natürliches, zellschützendes Molekül mit entzündungsreduzierenden und membranstabilisierenden Eigenschaften enthält.

PARI ProtECT Hals- und Rachenspray dient der Behandlung und Vorbeugung trockener und gereizter Schleimhäute in Mund und Rachen und lindert die typischen Erkältungssymptome wie Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit und Schluckbeschwerden. Es fördert die Linderung von Entzündungen in Mund und Rachen und verringert so die Dauer von Halsschmerzen und Heiserkeit.

Des Weiteren reduziert PARI ProtECT Hals- und Rachenspray die Gefahr bakterieller und viraler Infektionen in Mund und Rachen, unterstützt die Schleimlösung und fördert das freie Atmen. Es befeuchtet trockene und gereizte Schleimhäute und unterstützt den Heilungsprozess, indem es die Schleimhautbarriere stabilisiert. Das Spray beugt so Reizungen der Schleimhäute durch kalte Luft oder Klimaanlage vor.

Außerdem verringert PARI ProtECT Hals- und Rachenspray das Eindringen von Allergenen und lindert somit die typischen Symptome einer Pollenallergie in Mund und Rachen, wie juckender Gaumen.

PARI ProtECT Hals- und Rachenspray ist ein hypertonisches Hals- und Rachenspray mit angenehmem Salbeigeschmack. Das Spray ist konservierungsmittelfrei und die Wirkung basiert auf 100 % natürlichen Inhaltsstoffen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Kinder unter 2 Jahren sollten PARI ProtECT Hals- und Rachenspray nicht verwenden.
- PARI ProtECT Hals- und Rachenspray sollte nicht verwendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Ectoin® oder einem anderen Inhaltsstoff des Hals- und Rachensprays.
- Im Falle allergischer Reaktionen muss PARI ProtECT Hals- und Rachenspray unverzüglich abgesetzt werden.
- Aus hygienischen Gründen sollte jede Sprühflasche immer nur von einer Person verwendet werden.
- Nach Anbruch ist das Produkt maximal 6 Wochen verwendbar.
- PARI ProtECT Hals- und Rachenspray außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenden Sie das Produkt nicht an, falls die Verpackung beschädigt oder eingestochen ist.

Was muss ich vor der Verwendung von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray wissen?

Es liegen keine verfügbaren Daten hinsichtlich der Wechselwirkung von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray mit anderen Hals- und Rachensprays oder Lutschpastillen vor.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie PARI ProtECT Hals- und Rachenspray mit einem anderen Medizinprodukt oder Medikament im Mund- und Rachenbereich anwenden.

Wie wende ich PARI ProtECT Hals- und Rachenspray an?

Wenden Sie PARI ProtECT Hals- und Rachenspray stets gemäß dieser Gebrauchsanweisung an. Sprechen Sie bei Unsicherheiten mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Sofern nicht anders von Ihrem medizinischen Fachpersonal verordnet, geben Sie mehrmals täglich 1 bis 2 Sprühstöße in den Hals- und Rachenbereich.



Schütteln Sie die Flasche vor der ersten Anwendung von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray und pumpen Sie zwei- bis dreimal, um die Luft aus dem Pump-Mechanismus zu entfernen. Sollte die Sprühfunktion eingeschränkt sein (dies kann passieren, wenn die Flasche nicht aufrecht gehalten wird), drücken Sie den Pump-Mechanismus mehrmals, während Sie die Flasche aufrecht halten.

1. Schütteln Sie die Flasche.
2. Halten Sie die Flasche aufrecht in der Hand und legen Sie den Zeigefinger oben auf den Sprühkopf.
3. Öffnen Sie den Mund.
4. Halten Sie das Spray vor den Mund und drücken Sie den Sprühkopf zügig und fest nach unten.
5. Belassen Sie den Sprühkopf außerhalb des Mundes.
6. Wenn Sie den Mundinnenraum oder die Zunge mit dem Produkt berührt haben, wischen Sie die verunreinigte Spitze der Flasche mit einem sauberen, staubfreien Tuch ab.

Mögliche Nebenwirkungen von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray

PARI ProtECT Hals- und Rachenspray ist gut verträglich. Bisher sind keine wiederholt auftretenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder den Vertreter des Produktes, wenn Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray bemerken. Sollten die Symptome anhalten oder schlimmer werden, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie bewahre ich PARI ProtECT Hals- und Rachenspray auf?

Das Verfalldatum von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray ist auf der Faltschachtel und auf der Flasche aufgedruckt. PARI ProtECT Hals- und Rachenspray darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. PARI ProtECT Hals- und Rachenspray sollte bei einer Umgebungstemperatur von 2 °C bis 25 °C aufbewahrt werden.

Weitere Informationen

Sofern von Ihrem Arzt und Gesundheitsexperten empfohlen, darf PARI ProtECT Hals- und Rachenspray nach Operationen und Traumata verwendet werden. Zur Verwendung von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen derzeit keine Daten vor.

Wenden Sie sich bitte vor der Verwendung dieses Medizinprodukts an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie:

- schwanger sind oder stillen
 - nicht sicher sind, ob Sie schwanger sind oder nicht.
- Kinder und Patienten, die nicht in der Lage sind, PARI ProtECT Hals- und Rachenspray selbst zu verwenden, sollten während der Anwendung von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray unterstützt werden.

Inhalt von PARI ProtECT Hals- und Rachenspray

20 ml Lösung.
Ein Sprühstoß enthält 0,15 ml Lösung.

Inhaltsstoffe

Ectoin®, Meersalz, Phosphatpuffer, Xylitol, Natriumcyclamat, Caprylsäure, Minzöl, Salbeiöl, Wasser.

Hersteller

 bitop AG
Stockumer Str. 28
58453 Witten
Deutschland

Vertreiber

PARI GmbH
Spezialisten für effektive
Inhalation
Moosstraße 3
82319 Starnberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 8151 279 279

Stand der Information: 2019-05

Erklärung der auf dem Produkt verwendeten Symbole:

 CE-Kennzeichnung	 Hersteller	 Bitte Gebrauchsanweisung beachten	 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
 Chargennummer	 Verwendbar bis (Verfalldatum)	 ^{25°C} 2°C Temperaturbeschränkung	 Bestellnummer