



Inhalation mit meinem **PARI BOY®**.

Wie geht das?

Ratschläge und Tipps für die Inhalation
mit Ihrem PARI BOY.

So inhalieren Sie mit dem PARI LC SPRINT® Vernebler



1

Vor jeder Inhalation gründlich die Hände waschen.



2a

Mundstück oder Maske an den Vernebler stecken.



2b

Bei Verwendung einer BABY Maske den BABY Winkel verwenden.
Maskenposition entsprechend der Lage des Babys ausrichten.



3

Vernebler und Kompressor mit Anschlussschlauch verbinden.
Kompressor an Stromnetz anschließen.



4

Verschlussdeckel öffnen, Inhalationslösung einfüllen, Deckel schließen.



5a

Aufrecht und entspannt hinsetzen.
Gerät einschalten.
Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit den Lippen umschließen.



5b

Bei Verwendung einer Maske: Vernebler in senkrechter Position halten.
Maske muss dicht auf dem Gesicht aufliegen.



6

Langsam und tief einatmen.
Bei zu schnellem Einatmen erzeugt das integrierte PIF-Control System einen Widerstand. Sobald man diesen wahrnimmt, langsamer einatmen.
Das Medikament ist aufgebraucht, wenn am Vernebler ein verändertes Geräusch hörbar ist.



7

Gerät ausschalten.
Vernebler vom Schlauch abziehen.
Zum Trocknen des Schlauchs Gerät wieder einschalten.
Zur vollständigen Trennung vom Netz: Netzstecker ziehen.

PARI verlängert die Garantie Ihres kompressorbetriebenen Inhalationsgeräts um ein weiteres Jahr, wenn Sie es einmal jährlich im Fachhandel (Apotheke / med.-techn. Fachhandel) überprüfen lassen.

Bei teilnehmenden Fachhändlern* ist die Überprüfung kostenlos. Nutzen Sie dazu Ihren persönlichen PARI Gerätepass. Fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bis spätestens 12 Monate nach Kaufdatum Ihres Inhalationsgeräts beim teilnehmenden Fachhandel an.

* Nähere Informationen zu teilnehmenden Fachhändlern (Apotheke / med.-techn. Fachhandel), die kompressorbetriebene Inhalationsgeräte von PARI im Rahmen der Garantiezeitverlängerung kostenlos überprüfen, erhalten Sie im PARI Service Center unter +49 (0) 8151 279 279.

Hygiene und Wartung PARI LC SPRINT® Vernebler



1

Reinigung

... nach jeder Anwendung.

Vernebler in Einzelteile zerlegen und unter fließendem Trinkwasser vorspülen. Einzelteile in warmen Trinkwasser mit Spülmittel reinigen (Einwirkzeit: mind. 5 Min.), danach gründlich unter fließendem Trinkwasser nachspülen.



2

Desinfektion

... einmal wöchentlich.

In einer ausreichenden Menge in einer ausreichenden Menge kochendem Wasser (mind. 5 Min.)

oder

in einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät (z. B. für Babyflaschen) mind. 6 Min.



3

Trocknung

Einzelteile nach jeder Reinigung und/oder Desinfektion auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage legen.



4

Aufbewahrung

Teile an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.



5

Wartung: mind. 1x pro Jahr

Vernebler, Anschluss Schlauch und Luftfilter wechseln (PARI Year Packs). Bei Beschädigung oder Verschmutzung, die sich nicht reinigen lässt, gegebenenfalls früher erneuern.



Anwender-Video

www.pari.com oder diesen QR-Code scannen

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung des Verneblers und des Kompressors. Sie liegt den Geräten bei und enthält eine detaillierte Beschreibung. Bei Verlust können Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung unter www.pari.com aufrufen oder unter +49 (0)8151 279 279 anfordern.

Wir empfehlen, den Vernebler einmal im Jahr durch ein PARI Year Pack zu tauschen.

Zur Erinnerung tragen Sie auf der Plakette das Datum (Monat und Jahr) für den nächsten Austausch ein und kleben sie dann auf Ihren PARI Kompressor.

Informationen zu den PARI Year Packs erhalten Sie auf www.pari.com/year-packs oder im Fachhandel.

Jedes Familienmitglied sollte aus hygienischen Gründen sein eigenes PARI Year Pack benutzen. Diese können vom Arzt verordnet werden!

Nächster Austauschtermin:

Monat ankreuzen Jahr eintragen



Achtung: den Aufkleber auf keinen Fall über die Lüftungsschlitze des Kompressors kleben!

Die Inhalationslösungen von PARI

Zusätzlich zur Medikamentenanwendung bietet sich die Inhalation vernebelter Salzlösungen an, die die Atemwege befeuchten, schützen oder schleimlösend wirken. Sterile Kunststoffampullen ermöglichen die leichte Entnahme und sichere Dosierung der PARI Inhalationslösungen.



PARI NaCl 0,9 %
Inhalationslösung

PARI Protect®
Inhalationslösung mit Ectoin
Isoton (1,3 % Ectoin,
Meersalz, Wasser)

MucoClear Protect®
Inhalationslösung mit Ectoin
Hyperton (NaCl 3 %)

**z. B. bei Erkältungskrankheiten
oder als Trägerlösung**

**z. B. bei Erkältungssymptomen,
trockenem Husten,
Heuschnupfen und
allergischem Asthma**

**z. B. bei Bronchitis, akuter
Bronchiolitis, Asthma
und COPD**

befeuchtet die Atemwege

befeuchtet, schützt und
beruhigt die Atemwege

löst den Schleim, schützt die
Schleimhaut, bekämpft die
Entzündung

erstattungsfähig als Trägerlösung
für jedes Alter (in Deutschland,
AMR Anlage V)

erste Inhalationslösung mit
natürlichem Ectoin

für Säuglinge, Kinder und Erwachsene


steril und ohne Konservierungsmittel

20 x 2,5 ml; PZN: 03109789
60 x 2,5 ml; PZN: 00607423
120 x 2,5 ml; PZN: 03450382

10 x 2,5 ml; PZN: 12420440
20 x 2,5 ml; PZN: 12359982
60 x 2,5 ml; PZN: 12359999

10 x 5 ml; PZN: 16804114
20 x 5 ml; PZN: 16804120
60 x 5 ml; PZN: 16804137

10 x 5 ml; PZN: 12474217
20 x 5 ml; PZN: 12474223

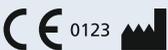

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: info@pari.de
Tel.: +49 (0)8151 279 0
www.pari.com

PARI Service Center
+49 (0)8151 279 279
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an.
Wir sind gerne für Sie da.