



## PARI SINUS2

### Verneblertherapie

zur Behandlung einer Entzündung  
der Nasennebenhöhlen

Tipps zur Verneblung und Hygiene



## Tipps zur Anwendung

### **Führen Sie die Therapie nicht bei verstopfter Nase durch.**

Bei Erkältungskrankheiten kann Ihnen im Vorfeld die Anwendung der Nasendusche helfen.

1. Waschen Sie sich vor jeder Anwendung gründlich die Hände.
2. Stecken Sie den orangen Düsen-aufsatz mit leichtem Druck bis zum Anschlag auf das Verneblerunterteil und verschließen Sie den Vernebler mit Hilfe des Vernebleroberteils.
3. Verbinden Sie das Winkelstück und das Nasenansatzstück mit dem Vernebler.
4. Füllen Sie die Inhalationslösung ein und schließen Sie den Deckel.
5. Stecken Sie das passende Ende eines Schlauches unten an den Vernebler. Das passende Ende des anderen Schlauches verbinden Sie mit dem Vibrationsanschluss und stecken diesen von oben auf den Vernebler. Das jeweils andere Ende der Schläuche stecken Sie in den Kompressor.

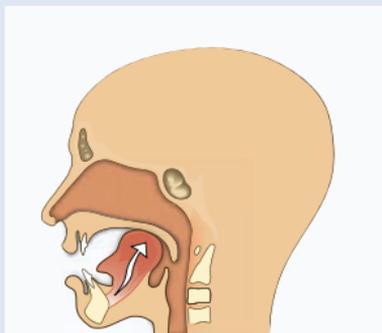


6. Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin. Verschließen Sie eine Nasenöffnung, indem sie entweder den Nasenstöpsel verwenden oder ein Nasenloch leicht zudrücken, und setzen Sie den Vernebler an die andere Nasenöffnung. Schalten Sie jetzt den Kompressor ein.



**7. Wichtig für die Therapie:**

Gaumensegel schließen!  
Um Ihr Gaumensegel zu schließen, sprechen Sie so lange wie möglich die Silbe „ing“ aus (ausgesprochen wie die zweite Silbe von Peking). Nach einer kurzen Atempause wiederholen Sie dies so oft, bis die Therapie abgeschlossen ist.



**Tipp: Kontrolle für das Schließen des Gaumensegels**

*Das Gaumensegel ist geschlossen, wenn die Nasenflügel leicht vibrieren und die Luft durch die Öffnung im freien Nasenloch ausströmt.*

8. Nach der Hälfte der Verneblungszeit (nach 2 – 3 Minuten) wechseln Sie die Nasenöffnung und fahren Sie wie unter Punkt 6 fort.
9. Schalten Sie nach beendeter Verneblung den Kompressor aus und ziehen Sie die Schläuche vom Vernebler ab. Schalten Sie das Gerät für ein paar Minuten wieder ein, um die Schläuche zu trocknen.



**So reduzieren Sie unangenehmen Druck in der Nase**

Stülpen Sie den Nasenstöpsel nach außen und schneiden Sie die Spitze an der vorgegebenen Kante mit einer Schere ab. Anschließend stülpen Sie den Nasenstöpsel wieder zurück.

## Tipps zur Hygiene

1. Ziehen Sie die Schläuche nach jedem Gebrauch vom Vernebler ab. Zerlegen Sie anschließend den Vernebler in seine Einzelteile: Nasenansatzstück, Winkelstück, Verneblerober- und -unterteil sowie Düsenaufsatz und Vibrationsaufsatz.

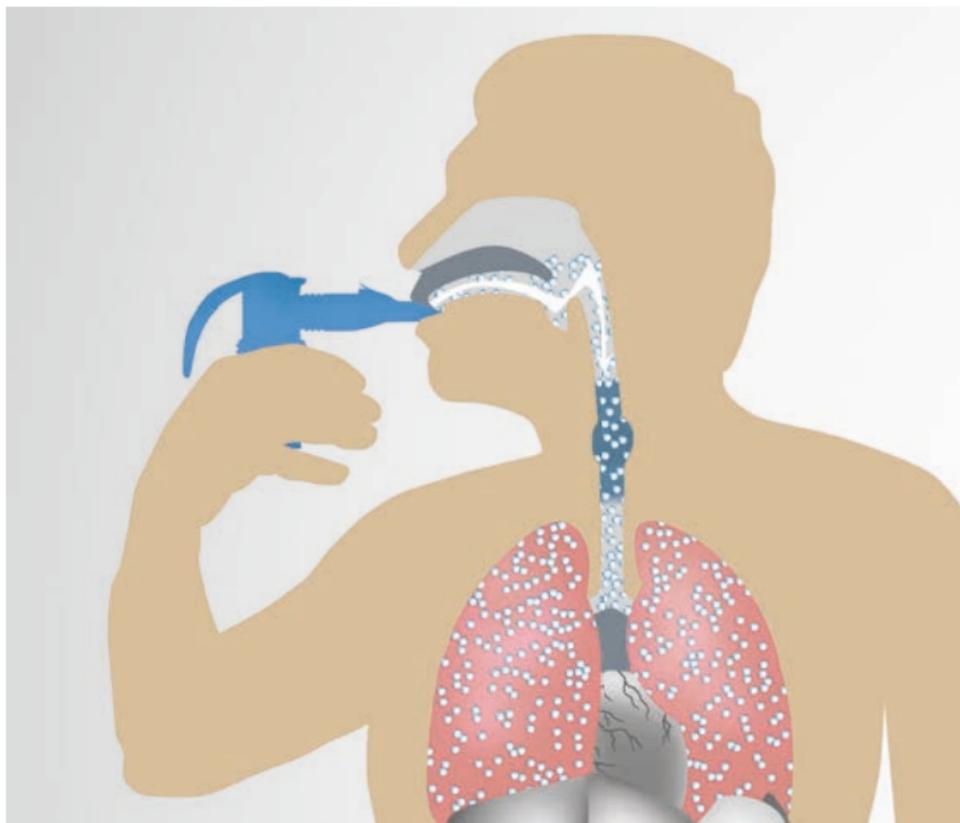

2. Legen Sie alle Einzelteile (außer das PARI SINUS2 Schlauchsystem) ca. 5 Minuten lang in warmes Leitungswasser mit etwas Spülmittel. Spülen Sie alle Einzelteile gründlich mit klarem Wasser nach.


3. Desinfizieren Sie den zerlegten Vernebler und das verwendete Zubehör mindestens einmal wöchentlich. Der PARI SINUS2 Vernebler kann im handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät desinfiziert werden. Oder Sie legen alle Teile mind. 5 Minuten in kochendes Wasser. Achten Sie darauf, dass alle Teile dabei vollständig mit Wasser bedeckt sind.


4. Lassen Sie die Einzelteile bei Raumtemperatur trocknen.


5. Bewahren Sie nach vollständiger Trocknung die Teile an einem trockenen, staubfreien Ort auf.


6. Luftfilter, Vernebler und Anschlusschlauch sollten jährlich ausgetauscht werden. Diese Bestandteile sind im PARI LC SPRINT SINUS2 Year Pack enthalten, welches im Fachhandel erhältlich ist. Bei gegebenenfalls nicht reinigbarer Verschmutzung oder Beschädigung früher erneuern.



Ihr **PARI SINUS2**

kann noch mehr!

Mit dem PARI LC SPRINT Vernebler können Sie den PARI SINUS2 für die Therapie der unteren Atemwege bzw. zur Befeuchtung aufrüsten. **Die Rund-um-Therapie für die oberen und unteren Atemwege!**



Weitere Informationen finden Sie in unseren Anwendervideos unter **[www.pari.com](http://www.pari.com)**



Auf einen Blick!



**PARI SINUS2**

mit PARI LC SPRINT SINUS  
Vernebler

PARI SINUS2 ist in Deutsch-  
land verschreibungs-  
und erstattungsfähig!

**Bestell-Nr.: 128G1000**

PZN: 13987887



**PARI LC SPRINT SINUS2 Year Pack**

PARI LC SPRINT SINUS Vernebler, PARI SINUS Schlauchsystem  
und Filter

**Bestell-Nr.: 023G8310**

PZN: 14420881



PARI GmbH  
Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3, 82319 Starnberg  
GERMANY  
E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)  
Tel.: +49 (0)8151 279 0  
Fax: +49 (0)8151 279 101  
[www.pari.com](http://www.pari.com)