



Ihr PARI SINUS2 kann noch mehr!

Die Therapie der unteren Atemwege

Mit dem PARI LC SPRINT Vernebler können Sie Ihren PARI SINUS2 für die Therapie der unteren Atemwege erweitern. So erhalten Sie eine umfassende Behandlungsmöglichkeit sowohl für die oberen als auch für die unteren Atemwege.



Was kann mit dem PARI SINUS2 vernebelt werden?

Durch die Verneblung von Salzlösungen kann festsitzender Schleim gelöst und das Druckgefühl in den Nebenhöhlen reduziert werden. Nasennebenhöhlenentzündungen können zusätzlich mit ärztlich verordneten Medikamenten behandelt werden.

Salzlösungen mit 0,9 % NaCl sind isoton, befeuchten die Atemwege und eignen sich bei trockenen Schleimhäuten. **Salzlösungen mit mehr als 0,9 % NaCl sind hyperton** und helfen, zähen Schleim zu lösen. Je höher der Salzgehalt, desto besser kann Schleim verflüssigt werden.



z. B. PARI MucoClear 3 % und 6 %

Auch Salzlösungen mit Ectoin können vernebelt werden. **Ectoin ist ein natürliches Zellschutzmolekül mit wasserbindenden Eigenschaften.** Dadurch bildet sich auf den Atemwegen ein Schutzfilm, der diese schützt, die Regeneration fördert und Entzündungssymptome lindern kann.



z. B. PARI MucoClear Protect

028D0109-C-2026-06



PARI SINUS2
Verneblertherapie
für die Nasen-
nebenhöhlen

Kurzanleitung

Weitere Informationen und
Anwendervideos finden Sie hier:



PARI GmbH, Moosstr. 3, 82319 Starnberg, GERMANY
Tel.: +49 (0)8151 279 0, Fax: +49 (0)8151 279 101
E-Mail: info@pari.de, www.pari.com

www.pari.com

Kurzanleitung

Für eine angenehme und wirksame Therapie sollte die Nase frei sein. Bei Erkältungskrankheiten kann eine Nasendusche dabei helfen, die Nasengänge vorab zu befreien. Waschen Sie sich vor jeder Anwendung gründlich die Hände.




Den orangenen Düsenaufsatz auf das Verneblerunterteil stecken und das blaue Vernebleroberteil darauf aufsetzen.



Das Winkelstück mit dem Nasenansatzstück auf den Vernebler aufstecken.



Die Inhalationslösung einfüllen und Deckel schließen.

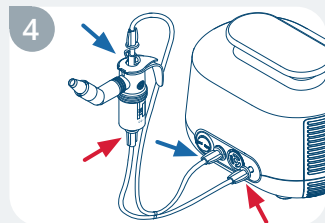


Ein Schlauchende an den Vernebler stecken und das freie Ende mit dem Kompressor verbinden. Den zweiten Schlauch am Vibrationsanschluss aufstecken und diesen auf den Vernebler setzen. Anschließend das freie Schlauchende in den Kompressor stecken. Kompressor einschalten.



Aufrecht und entspannt hinsetzen. Eine Nasenöffnung verschließen (mit Nasenstöpsel oder leicht zudrücken) und den Vernebler an die andere Nasenöffnung setzen.

Wichtig: Das Gaumensegel muss während der Therapie geschlossen werden. Hierfür möglichst lang die Silbe „ing“ aussprechen (wie in „Pe-king“). Nach kurzer Atempause wiederholen, bis die Therapie beendet ist.

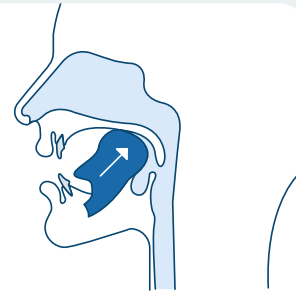

Tipp: Das Gaumensegel ist geschlossen, wenn die Nasenflügel leicht vibrieren und Luft aus der offenen Nasenöffnung strömt.

6 Nach der Hälfte der Verneblungszeit (ca. 2 – 3 Minuten) die Nasenöffnung wechseln.



Nach Abschluss der Verneblung den Kompressor ausschalten und die Schläuche vom Vernebler abziehen. Gerät für ein paar Minuten erneut einschalten, damit die Schläuche trocknen.

Um den Druck in der Nase zu reduzieren: Nasenstöpsel nach außen stülpen, die Spitze an der vorgegebenen Kante abschneiden und den Stöpsel wieder zurückstülpen.

Reinigung

Weitere Informationen in der Gebrauchsanweisung bitte unbedingt beachten.



Nach jeder Anwendung reinigen: Hierzu die Schläuche vom Vernebler abziehen. Den Vernebler in Einzelteile zerlegen und diese (ohne Schlauchsystem) ca. 5 Minuten in warmem Wasser mit etwas Spülmittel einlegen und anschließend unter fließendem Wasser reinigen.



Einmal pro Woche desinfizieren: im thermischen Desinfektionsgerät oder mind. 5 Minuten in kochendes Wasser legen.

Wichtig: Das Schlauchsystem darf weder gereinigt noch desinfiziert werden. Bitte die Hinweise zur Trocknung in der Kurzanleitung (Schritt 7) beachten.



Alle Einzelteile trocknen lassen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

Für eine optimale Funktion sollten Luftfilter, Vernebler und Anschlusschlauch mindestens einmal jährlich ausgetauscht werden. Bei Verschmutzung oder Beschädigung ist ein früherer Austausch erforderlich. Passende Ersatzteile sind im PARI LC SPRINT SINUS2 Year Pack erhältlich.