

Die patentierte Einhand-Bedienhilfe ermöglicht es, die VORTEX mit einer Hand anzuwenden und das Dosieraerosol auszulösen. So können Sie Ihr Kind während der Inhalation sicher halten – für den Therapieerfolg bei der Inhalation mit Babys.

# Anwendung der VORTEX® im Video einfach erklärt



## **VORTEX®** – perfekt für Kinder jeden Alters





VORTEX mit Babymaske und Einhand-Bedienhilfe





VORTEX mit Kindermaske





VORTEX mit Mundstück

# VORTEX® Baby- und Kindermasken – extra komfortabel und effizient

 Angenehmer Tragekomfort – für eine hohe Akzeptanz und eine stressfreie Anwendung für Kind und Eltern



• Kinderleichte Hygiene – auskochbar, sterilisierbar und spülmaschinenfest





PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY E-Mail: info@pari.de, Tel.: +49 (0) 8151 279 0, www.pari.com



## **VORTEX®**

Vorschalten, Abatmen, Aufatmen.

KURZANLEITUNG





www.pari.com

## So einfach geht's: Aufbau & Inhalation mit...

### ... Mundstück



Spray-Kappe entfernen, kräftig schütteln



Spray hinten in die VORTEX stecken



VORTEX-Kappe entfernen



Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit Lippen umschließen



Spray auslösen



Tief und langsam ein- und ausatmen

#### Bei mehreren Sprühstößen pro Anwendung: Schritt 5 und 6 wiederholen

**0–18 Monate:** 4–6 Atemzüge, **> 18 Monate:** 2–4 Atemzüge

## ... Babymaske und Einhand-Bedienhilfe



Spray-Kappe entfernen, kräftig schütteln



Einhand-Bedienhilfe über die Kammer schieben



Spray in den Anschlussring stecken und die Einhand-Bedienhilfe einklicken



Kappe entfernen und Maske aufstecken



Maske dicht über Mund und Nase legen



Spray auslösen, tief und langsam ein- und ausatmen

## Bei mehreren Sprühstößen pro Anwendung:

Schritt 6 wiederholen

**0–18 Monate:** 4–6 Atemzüge, **> 18 Monate:** 2–4 Atemzüge



Reinigung in warmen Wasser mit Spülmittel, mit klarem Wasser abwaschen





Trocknen lassen



#### **Alternativ:**

In Spülmaschine einräumen, Programm mit min. 50°C wählen

### Alternativ:

Desinfektion im Babyflaschen Vaporisator