

So inhalieren Sie mit dem PARI COMPACT2



1
Vor jeder Inhalation gründlich die Hände waschen.



2
Mundstück oder Maske an den Vernebler stecken.



3
Vernebler und Kompressor mit Anschlusschlauch verbinden.
Kompressor an Stromnetz anschließen.



4
Verschlussdeckel öffnen, Inhalationslösung einfüllen, Deckel schließen.



5a
Aufrecht und entspannt hinsetzen.
Gerät einschalten.
Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit den Lippen umschließen.



5b
Bei Verwendung einer Maske:
Vernebler in senkrechter Position halten.
Maske muss dicht auf dem Gesicht aufliegen.



6
Langsam und tief einatmen, entspannt ausatmen.
Das Medikament ist aufgebraucht, wenn am Vernebler ein verändertes Geräusch hörbar ist.



7
Gerät ausschalten.
Vernebler vom Schlauch abziehen.
Zum Trocknen des Schlauchs Gerät wieder einschalten.



8
Zur vollständigen Trennung vom Netz: Netzstecker ziehen.

Hygiene und Wartung PARI LC SPRINT® COMPACT Vernebler



1 Reinigung

... nach jeder Anwendung.

Vernebler in Einzelteile zerlegen und unter fließendem Trinkwasser vorspülen. Einzelteile in warmem Trinkwasser mit Spülmittel reinigen (Einwirkzeit: mind. 5 Min.), danach gründlich unter fließendem Trinkwasser nachspülen.



2 Desinfektion

... einmal wöchentlich.

In einer ausreichenden Menge in einer ausreichenden Menge in kochendem Wasser (mind. 5 Min.)

oder

in einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät (z. B. für Babyflaschen) mind. 6 Min.



3

Trocknung

Einzelteile nach jeder Reinigung und/oder Desinfektion auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage legen.



4

Aufbewahrung

Teile an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.



5


Wartung: mind. 1x pro Jahr

Vernebler, Anschlusschlauch und Luftfilter wechseln (PARI Year Packs). Bei Beschädigung oder Verschmutzung, die sich nicht reinigen lässt, gegebenenfalls früher erneuern.

Ein Video zur Handhabung und Reinigung finden Sie auf www.pari.com.



Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung des Verneblers und des Kompressors. Sie liegt den Geräten bei und enthält eine detaillierte Beschreibung. Bei Verlust können Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung unter www.pari.com aufrufen oder unter +49 (0)8151 279 279 anfordern.

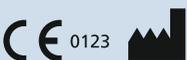

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY, Tel: +49 (0)8151 279 0, E-Mail: info@pari.de, www.pari.com