

# L'inhalation avec le nébuliseur

## PARI LC SPRINT® SP



1

Bien se laver les mains avant chaque séance.



2a

Ouvrir le couvercle du nébuliseur en le faisant basculer vers l'avant.



2b

Verser le(s) médicament(s) dans le nébuliseur (volume minimum = 2 ml/ maximum = 8 ml). Refermer le couvercle.



3

Raccorder l'embout buccal ou le masque au nébuliseur.



4

En cas d'utilisation du masque pour nourrissons PARI Baby, emboîter le coude et l'orienter en fonction de la position du bébé.



5

Raccorder le nébuliseur au compresseur avec la tubulure ; brancher la prise du compresseur ; appuyer sur l'interrupteur du compresseur.



6

S'asseoir en se tenant droit mais rester détendu.



7a

Maintenir l'embout buccal entre les dents et serrer les lèvres autour pendant la séance.



7b

Maintenir le nébuliseur à la verticale. En cas d'usage du masque, le maintenir bien appuyé sur le nez et la bouche du patient en exerçant une légère pression.



8

Inspirer calmement et profondément au travers de l'embout buccal ou du masque, puis expirer calmement. Un changement de bruit dans le nébuliseur (gargouillement) indique que la séance est terminée. Éteindre le compresseur.



9

Débrancher le nébuliseur de la tubulure ; jeter le volume résiduel de médicament. Si de la condensation (buée) s'est formée dans celui-ci, y envoyer de l'air pendant quelques minutes pour le sécher.



10

Pour déconnecter l'appareil complètement du secteur, débrancher la fiche secteur.

# Entretien et maintenance du nébuliseur PARI LC SPRINT® SP au domicile du patient



1

## Nettoyage (après chaque séance)

- Jeter le volume résiduel de médicament.
- Démontez le nébuliseur complètement (4 pièces).
- Nettoyer toutes les pièces avec du détergent et de l'eau chaude.
- Rincer toutes les pièces sous l'eau courante.



2

## Désinfection

- Faire bouillir dans l'eau le nébuliseur au moins 6 minutes.  
ou:
- Le placer dans un désinfecteur à vapeur pour biberons pendant au moins 5 minutes.



3

## Séchage

Laisser sécher 4 heures les pièces du nébuliseur démonté sur une surface propre et sèche. Les pièces seront complètement sèches en 4 heures environ.



4

## Conservation / rangement

Garder le nébuliseur dans un tissu propre et non pelucheux dans un endroit sec.



5

## Renouvellement

Remplacer le nébuliseur PARI LC SPRINT SP et sa tubulure au bout de SIX SEMAINES D'UTILISATION.

Référez-vous aux notices complètes fournies avec les compresseurs et nébuliseurs PARI si vous avez besoin d'informations complémentaires.

Il est possible de se procurer ces notices si vous les avez égarées en contactant PARI PulmoMed au **01 56 83 85 00**.

### PARI PulmoMed SARL

Z.A. du Petit Nanterre  
11 avenue de l'île Saint-Martin  
92737 Nanterre Cedex  
Tel.: +33 (0) 1 56 83 85 00  
Fax: +33 (0) 1 56 83 85 09  
E-Mail: [clients@pari-pulmomed.fr](mailto:clients@pari-pulmomed.fr)  
[www.pari.com](http://www.pari.com)

