

Comment assembler et utiliser votre nébuliseur eFlow®rapid

1



Raccordez la membrane en acier à la cuve de nébulisation.

2




Insérez la valve inspiratoire bleue dans la partie avant du nébuliseur.

3




Refermez le nébuliseur en amenant la partie avant sous la languette.

4

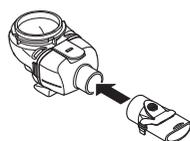

Installez l'embout buccal.

5

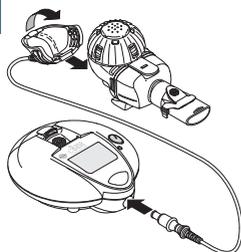


Raccordez le nébuliseur au générateur ; si nécessaire (usage sur secteur) raccordez le générateur à la prise de courant.

6




Remplissez la cuve du médicament à nébuliser (volume minimum 2 ml/ maximum 6 ml).

7

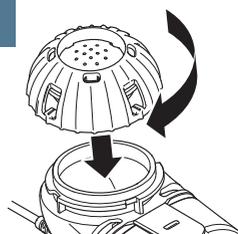


Placer le couvercle sur la cuve et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

8

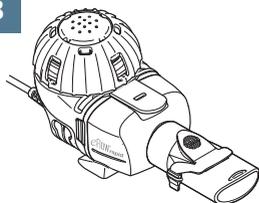


Le couvercle doit former un dôme continu et ne doit plus pouvoir tourner.

9

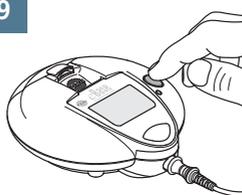

Appuyez sur l'interrupteur noir jusqu'à l'allumage du témoin lumineux vert et au déclenchement du signal sonore. L'aérosol (nuage) commence à sortir du nébuliseur.

10

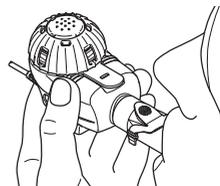


Placez l'embout dans la bouche ; respirez lentement et profondément jusqu'au déclenchement du double signal sonore indiquant la fin du traitement. La séance dure environ 3 mn pour 2,5 ml de médicament et maximum 10 mn pour 5 ml de médicament.

Consultez également la notice d'instructions complète de l'eFlow®rapid.

Comment entretenir votre nébuliseur eFlow®rapid

A faire après chaque séance :

11

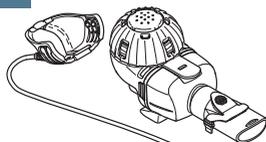


Détachez le nébuliseur du générateur.

12



Ouvrez le couvercle et videz le reste de médicament en suivant les instructions figurant sur la notice d'emballage du médicament

13

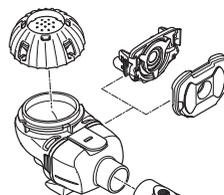

Démontez complètement le nébuliseur.

14

Rincer avant de tremper



Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces du nébuliseur avec de l'eau chaude et un peu de détergent pendant 5 minutes.

15



Rincez toutes les pièces sous le jet d'eau ; en particulier rincez les faces avant et arrière de la membrane en acier sous le jet d'eau.

16

Desinfection


Utilisez un désinfecteur à vapeur pour biberons; le temps d'exposition à la vapeur doit être d'au moins 6 minutes. Respectez le mode d'emploi du désinfecteur



Méthode alternative :

Faites bouillir toutes les pièces du nébuliseur (y compris le tamis) dans de l'eau déminéralisée ou distillée pendant au moins 5 minutes.


17

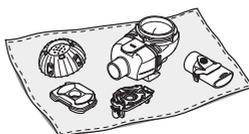

Séchage

Placez toutes les pièces du nébuliseur sur un revêtement sec, propre et absorbant et laissez-les entièrement sécher.

18

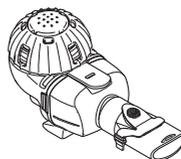

Le nébuliseur eFlow®rapid doit être remplacé tous les six mois.

Consultez également la notice d'instructions complète de l'eFlow®rapid.



PARI GmbH
Moosstraße 3
82319 Starnberg
GERMANY

PARI France

11, avenue de l'île Saint-Martin
92737 Nanterre Cedex
Tel.: +33 (0) 1 56 83 85 00
E-Mail: clients-fr@pari.com
www.pari.com