



## PARI ボーイ Pro



100年以上の歴史を持つドイツPARI社の  
スタンダードモデル

# PARI ボーイ Pro

子供から大人まで様々な年代に対応した  
下気道治療のスタンダード

## PARI LCスプリントネブライザーを採用

PARI LCスプリントネブライザーは、下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間の短縮を実現しました。

## インターバル噴霧

噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。

## 小児用ソフトマスク

マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。



**4年保証**  
(コンプレッサーのみ)

注文コード	M23-001-24
品番	130G1012
標準価格	¥35,000
<b>吸入器仕様</b>	
電源	AC100V 50-60Hz
流量	5ℓ/分(ネブライザー接続時)
重量	約1.7kg
外形寸法	約W18.5×D15×H13cm
保証期間	4年(コンプレッサー)
<b>一般医療機器</b>	
届出番号	27B1X00024000416
販売名	PARI ボーイPro

<b>エアロゾルの特性 (インサート青・赤)</b>	
分時噴霧量※1	600mg/分・450mg/分
分時粒子噴霧量※2	0.16mℓ/分・0.10mℓ/分
形状基準偏差※2	2.24・2.00
粒子径中央値MMAD※2	3.8μm・2.8μm
5μm以下の粒子質量の比率※2	61.9%・79.6%
分時5μm以下粒子噴霧量※2	99μℓ/分・80μℓ/分
※1(測定条件) ネブライザー使用時の空気圧: 1.6bar(約160kPa)以下 試験液: 0.9%生理食塩水(5mℓ) 室温: 23℃、湿度: 50% 測定装置: Malvern社 Master Sizer X 流量: 5ℓ/分(ネブライザー接続時) 分時平均吸入流量: 20ℓ/分	
※2 ISO 27427:2013の測定条件に基づいて実施	

### 標準セット内容

- 吸入器本体
- PARI 送気ホース
- インサート 赤
- PARI LCスプリントネブライザー(インサート青)
- PARI マウスピース(呼吸バルブ付)
- PARI 噴霧ボタン
- PARI 小児用ソフトマスク



## PARI LCスプリント

- ・ 吸気型ネブライザー
- ・ 下気道治療に適した5μm以下の粒子を発生させるバルブシステムにより、吸入効率を向上させます。
- ・ 豊富なアクセサリーで、様々な年代に対応した治療が可能です。
- ・ パーツが少なく組立や分解が簡単です。
- ・ オートクレーブ滅菌が可能です。

PARI LCスプリントネブライザー

インサート青

※インサート青はネブライザーに取り付けられています。

PARI LCスプリントネブライザーは、吸入時にエアロゾルの発生量を増加させ、吸入効率を向上させる吸気型ネブライザーです。色の違うインサートによってサイズを調整できます。

# PARI PIF コントロールシステム

(PIF : Peak Inspiration Flow 最大吸気流量)

PARI LCスプリントネブライザーには、吸入速度が速すぎる場合に、適正速度に緩める補助構造を内蔵しました



**PIF  
CONTROL**

Patented  
system

小さなフラップによる大きな効果

PARI PIFコントロールシステムは、吸入速度が速すぎる(30ℓ/分以上)場合に、蓋裏側に装着された吸気フラップがわずかな隙間を残してネブライザーチャンバーを閉じる構造となっています。このシステムが吸気抵抗を増大させて、使用者に吸気速度が速すぎることを気付かせます。

この抵抗を感じたら、さらにゆっくりと吸気することで、吸入薬剤の沈着を改善します。呼吸しているときにこの抵抗を感じなければ、適切な速度で呼吸できています。

PARI PIFコントロールシステムの動き

ゆっくりと呼吸することで咽頭などへの吸入薬剤の沈着を減少させて、吸入薬剤を末梢気道まで導きます。

ネブライザーからのフィードバック(吸気抵抗の増大)が理想的な吸気速度(30ℓ/分以下)に安定させ、効果的な投薬を可能にします。

早すぎる吸入(高速吸入)



適切な吸入(低速吸入)



※喘息患者放射性エアロゾルの高速吸入及び低速吸入後のガンマカメラ画像

## ネブライザーの特長

5μm以下の粒子の高い比率  
エアロゾルのロスを抑制  
吸入治療をカスタマイズ  
洗浄が簡単  
可能



インサート赤

末梢気道または生後1か月の乳児や未熟児に適した最小粒子径  
また気道過敏試験にも使用できます。  
※インサートのみの販売はございません。

は、二つのバルブシステムが吸気し、呼吸時にエアロゾルのロスを抑  
ズの違いが発生します。

滅菌・消毒

煮沸消毒(5分間)、オートクレーブ滅菌(121℃/20分又は134℃/3分)、  
ポリプロピレン樹脂に適した消毒液による消毒



インサート 青

成人、小児の中極気道に適した  
標準粒子径

インサート 赤

末梢気道または生後1か月の乳  
児や未熟児に適した最小粒子径



補充品	注文コード	品番	標準価格
PARI LCスプリントネブライザー 送気ホース無※	M23-001-27	023G6001	¥ 5,000
PARI 送気ホース1.2m (吸入器用)	M23-004-45	041B4591	¥ 1,500
PARI エアーフィルター Pro用	M23-004-49	041G1002	¥ 480
PARI エアーフィルター、ホルダー付 Pro用	M23-004-80	041G1003	¥ 1,200
PARI 噴霧ボタン	M23-004-32	022G1000	¥ 2,400
PARI 小児用ソフトマスク(くるりん)	M23-004-30	041G0741	¥ 1,900

別売品	注文コード	品番	標準価格
PARI LCスプリントイヤーク※	M23-001-26	023G3011	¥ 6,800
PARI LCスプリントトラケオ※	M23-004-90	023G1080	¥ 8,400
PARI フィルター・バルブセット	M23-004-36	041G0500	¥ 4,300
PARI ベップSシステム※※	M23-004-91	018G4000	¥ 7,700
PARI キャリングケース	M23-004-51	085E1100	¥ 8,500
PARI 唾液トラップ	M23-004-35	041G0530	¥ 1,500
PARI スマートマスク	M23-004-28	041G0730	¥ 11,000
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥ 1,900
PARI ベビーマスク(新生児用) ベビーバント付	M23-004-22	041G0700	¥ 6,000
PARI ベビーマスク(小) ベビーバント付	M23-004-23	041G0701	¥ 6,000
PARI ベビーマスク(中) ベビーバント付	M23-004-24	041G0702	¥ 6,000
PARI ベビーマスク(大) ベビーバント付	M23-004-25	041G0703	¥ 6,000
PARI ベビーバント	M23-004-21	041E0701	¥ 1,300
PARI フレンズ(シール無)	M23-004-96	022G7036	¥ 1,200
PARI フレンズシール(ゾウ)	M23-004-98	022D0046	¥ 250



※一般医療機器 届出番号:27B1X00024000317 販売名:PARI ネブライザー  
 ※※一般医療機器 届出番号:27B1X00024000325 販売名:PARI ベップシステム



※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
 ※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
 ※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

**Muranaka** 村中医療器 株式会社  
 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd. <http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360  
 総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641 東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217  
 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122 仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448  
 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501 金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490  
 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116 村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121  
 北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930  
 広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

RS2201.3000