

PARI ボーイPro PARI ボーイJunior



100年以上の歴史を持つドイツPARI社の
スタンダードモデル



Authorized
Distributor

PARI ボーイPro

子供から大人まで様々な年代に対応した
下気道治療のスタンダード

PARI LCスプリントネブライザーを採用

PARI LCスプリントネブライザーは
下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ
吸入時間の短縮を実現しました。

インターバル噴霧

噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた
吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。

小児用ソフトマスク

マウスピースが使えない小児は
標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。



4年保証 (コンプレッサーのみ)

注文コード	M23-001-24
品番	130G1012
標準価格	¥35,000

吸入器仕様

電源	AC100V 50-60Hz
流量	5ℓ/分(ネブライザー接続時)
重量	約1.7kg
サイズ	約W18.5×D15×H13cm
保証期間	4年(コンプレッサーのみ)

一般医療機器
届出番号:27B1X00024000416
販売名:PARI ボーイPro

エアロゾルの特性

インサート	青	赤
分時噴霧量(mg/分) ^{※1}	600	450
分時粒子噴霧量(mℓ/分) ^{※2}	0.16	0.10
形状基準偏差 ^{※2}	2.24	2.00
粒子径中央値MMAD(μm) ^{※2}	3.8	2.8
5μm以下の粒子質量の比率(%) ^{※2}	61.9	79.6
分時5μm以下粒子噴霧量(μℓ/分) ^{※2}	99	80

^{※1}(測定条件)
ネブライザー使用時の空気圧: 1.6bar(約160kPa)以下
試験液: 0.9%生理食塩水(5mℓ)
室温: 23℃、湿度: 50%
測定装置: Malvern社 Master Sizer X
流量: 5ℓ/分(ネブライザー接続時)
分時平均吸気流量: 20ℓ/分

^{※2} ISO 27427:2013の測定条件に基づいて実施

標準セット内容

- 吸入器本体 ●PARI LCスプリントネブライザー(インサート 青) ●インサート 赤 ●PARI 送気ホース
- PARI マウスピース(呼吸バルブ付) ●PARI 噴霧ボタン ●PARI 小児用ソフトマスク



★末梢気道または生後1か月の乳児や未熟児に適した最小粒子径。また気道過敏試験にも使用できます。
(インサートのみの販売はございません)

PARI LCスプリント



PARI LCスプリントネブライザー

インサート青

※インサート青はネブライザーに取り付けられています。

- 吸気型ネブライザー
- 下気道治療に適した5μm以下の粒子径
- バルブシステムにより吸入量を抑制
- 豊富なアクセサリで様々な年代に対応
- パーツが少なく組立や清掃が簡単
- オートクレープ滅菌が可能

PARI LCスプリントネブライザーは、吸入時にエアロゾルの発生量を抑制する吸気型ネブライザーです。色の違うインサートによってサ

PARI ボーイJunior

乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径
カラフルな外観

PARI LCスプリントジュニアを採用

PARI ボーイJuniorは、乳幼児から小児までの吸入治療に選ばれています。乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児や小児の細かい気道に適したネブライザーです。

シリコン製ベビーマスクとベビーベント

乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付。



★末梢気道または生後1か月の乳児や未熟児に適した最小粒子径。また気道過敏試験にも使用できます。(インサートのみ販売はございません)

ネブライザーの特長

5μm以下の粒子の高い比率
エアロゾルのロスを抑
吸入治療をカスタマイズ
洗浄が簡単
可能



PARI LCスプリントジュニア

インサート黄

※インサート黄はネブライザーに取り付けられています。

ーは、二つのバルブシステムが
増加し、呼吸時にエアロゾルの
ザーです。
イズの違う粒子が発生します。

4年保証
(コンプレッサーのみ)

注文コード	M23-001-25
品番	130G1312
標準価格	¥38,000

吸入器仕様

電源	AC100V 50-60Hz
流量	5ℓ/分(ネブライザー接続時)
重量	約1.7kg
サイズ	約W18.5×D15×H13cm
保証期間	4年(コンプレッサーのみ)

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000417
販売名: PARI ボーイJunior

エアロゾルの特性

インサート	黄	赤
分時噴霧量(mg/分)※1	369	300
分時粒子噴霧量(μℓ/分)※2	0.16	0.10
形状基準偏差※2	2.11	2.00
粒子径中央値MMAD(μm)※2	3.1	2.8
5μm以下の粒子質量の比率(%)※2	73.3	79.6
分時5μm以下粒子噴霧量(μℓ/分)※2	117	80


※1(測定条件)

ネブライザー使用時の空気圧: 1.6bar(約160kPa)以下
試験液: 0.9%生理食塩水(5mℓ)
室温: 23℃、湿度: 50%
測定装置: Malvern社 Master Sizer X
流量: 5ℓ/分(ネブライザー接続時)
分時平均吸気流量: 12ℓ/分

※2 ISO 27427:2013の測定条件に基づいて実施

煮沸消毒(5分間)、オートクレーブ滅菌(121℃/20分又は134℃/3分)、
ポリプロピレン樹脂に適した消毒液による消毒

インサート青	インサート黄	インサート赤
 成人、小児の中枢気道に適した標準粒子径	 小児、乳児の中枢気道に適した小粒子径	 末梢気道または生後1か月の乳児や未熟児に適した最小粒子径

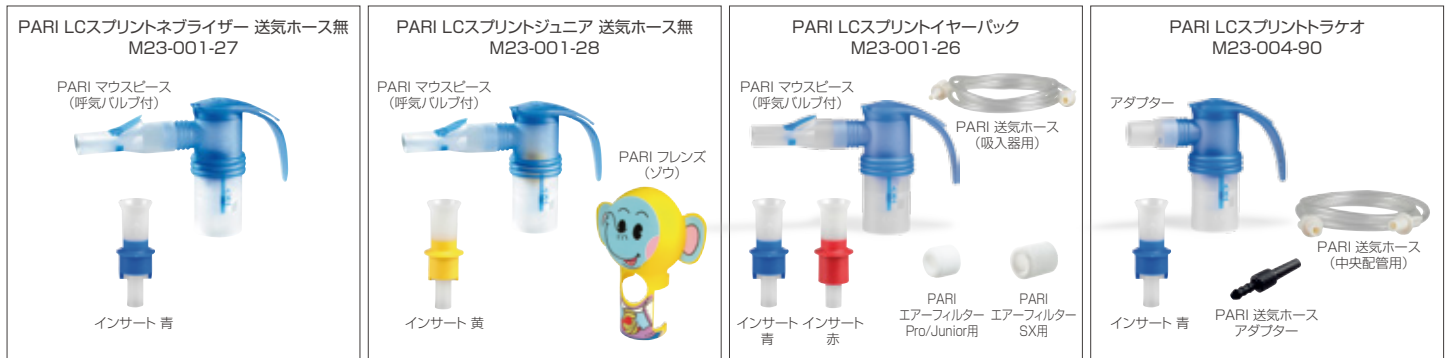

商品名	注文コード*	品番	標準価格	別…別売品 補…補充品	
				Pro	Junior
PARI LCスプリントネブライザー 送気ホース無*	M23-001-27	023G6001	¥5,000	補	別
PARI LCスプリントジュニア 送気ホース無*	M23-001-28	023G6003	¥5,100	別	補
PARI LCスプリントイヤークック*	M23-001-26	023G3011	¥6,800	別	別
PARI LCスプリントトラケオ*	M23-004-90	023G1080	¥8,400	別	別
PARI 送気ホース1.2m(吸入器用)	M23-004-45	041B4591	¥1,500	補	別
PARI 送気ホース2.1m(吸入器用)	M23-004-47	041G4587	¥1,500	別	補
PARI エアフィルター Pro/Junior用	M23-004-49	041G1002	¥480	補	補
PARI エアフィルター、ホルダー付 Pro/Junior用	M23-004-80	041G1003	¥1,200	補	補
PARI フィルター・バルブセット	M23-004-36	041G0500	¥4,300	別	別
PARI ペップSシステム**	M23-004-91	018G4000	¥7,700	別	別
PARI キャリングケース	M23-004-51	085E1100	¥8,500	別	別
PARI 唾液トラップ	M23-004-35	041G0530	¥1,500	別	別
PARI 噴霧ボタン	M23-004-32	022G1000	¥2,400	補	別
PARI スマートマスク	M23-004-28	041G0730	¥11,000	別	別
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥1,900	別	別
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥1,900	補	別
PARI ベビーマスク(新生児用)ベビーベント付	M23-004-22	041G0700	¥6,000	別	別
PARI ベビーマスク(小)0~1歳 ベビーベント付	M23-004-23	041G0701	¥6,000	別	別
PARI ベビーマスク(中)1~3歳 ベビーベント付	M23-004-24	041G0702	¥6,000	別	補
PARI ベビーマスク(大)3歳以上 ベビーベント付	M23-004-25	041G0703	¥6,000	別	別
PARI ベビーベント	M23-004-21	041E0701	¥1,300	別	補
PARI フレンズ(シール無)	M23-004-96	022G7036	¥1,200	別	補
PARI フレンズ・シール(ゾウ)	M23-004-98	022D0046	¥250	別	補



* 一般医療機器 届出番号:27B1X00024000317 販売名:PARI ネブライザー
** 一般医療機器 届出番号:27B1X00024000325 販売名:PARI ペップSシステム

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
 総合センター ☎0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641 東京支店 ☎03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
 札幌営業所 ☎011-737-9121 (代) FAX011-737-9122 仙台営業所 ☎022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
 埼玉営業所 ☎048-844-3500 (代) FAX048-844-3501 金沢営業所 ☎076-286-4531 (代) FAX076-286-0490
 名古屋営業所 ☎052-709-7111 (代) FAX052-709-7116 村中船越ビル ☎06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
 北大阪営業所 ☎06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006 米子営業所 ☎0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
 広島営業所 ☎082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123 (代) FAX092-474-1363