


PARI SINUS

Pulsating Aerosol System

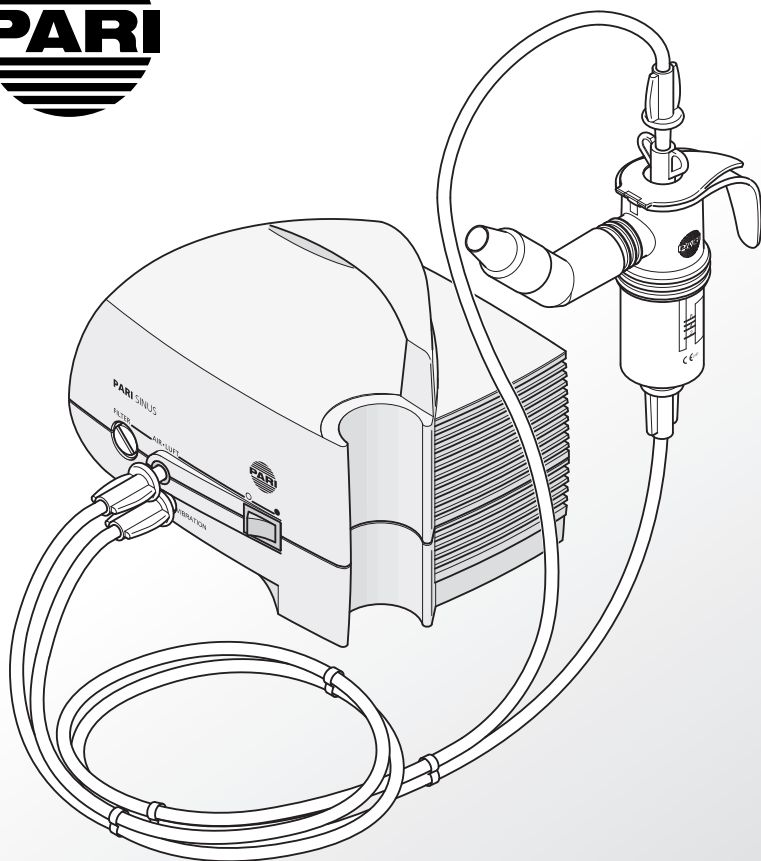


FRANÇAIS

Pour l'usage patient seul (une personne) seulement

1. ILLUSTRATION DU SYSTÈME PARI SINUS


- 1 Compresseur PARI SINUS
- 2 Nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS
 - 2a Section supérieure du nébuliseur
 - 2b Buse accessoire (orange)
 - 2c Section inférieure du nébuliseur
- 3 Raccord de vibration
- 4 Bouchon nasal souple
- 5 Adaptateur nasal
- 6 Coude à 45 °
- 7 Raccord mâle du tube de vibration
- 8 Raccord femelle du tube d'air

ILLUSTRATION DU SYSTÈME PARI SINUS

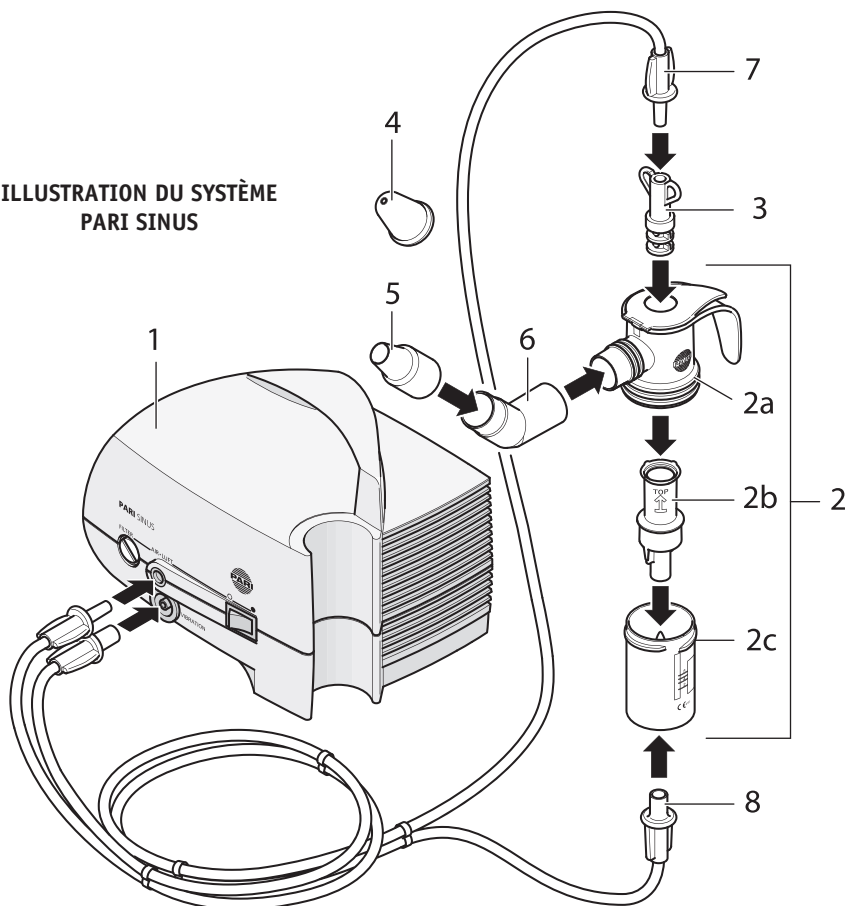

2. ILLUSTRATION DU COMPRESSEUR PARI SINUS (Type 028)

- 9 Cordon d'alimentation
- 10 Étiquette du numéro de série
- 11 Prise du cordon d'alimentation
- 12 Support du nébuliseur
- 13 Interrupteur Marche/Arrêt
- 14 Sortie des vibrations
- 15 Sortie d'air
- 16 Filtre à air

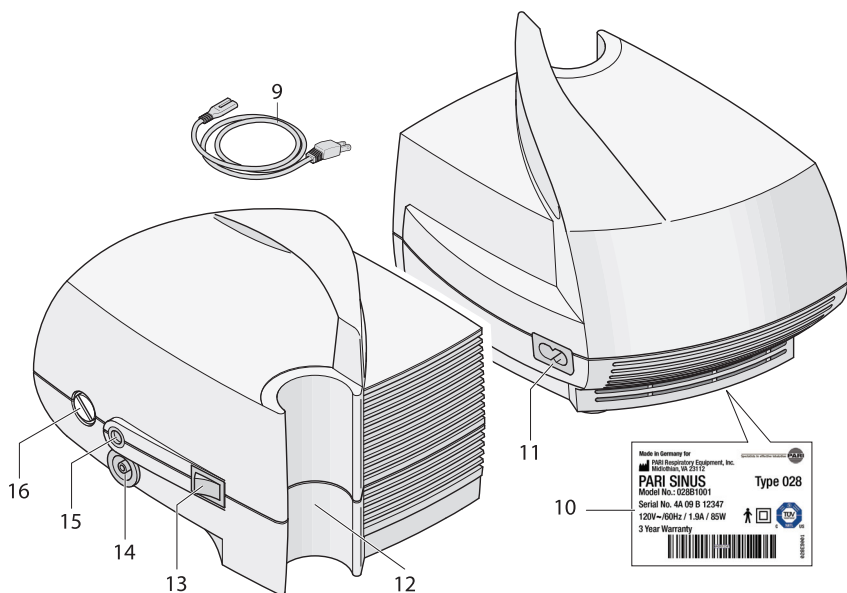

3. AUTRES ILLUSTRATIONS

FIGURE A

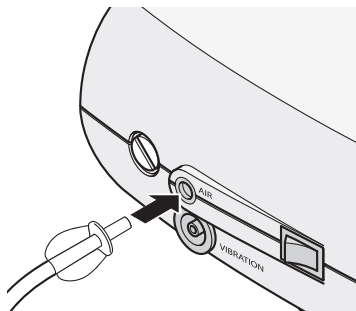


FIGURE B

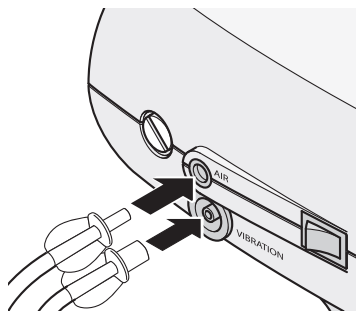


FIGURE C



FIGURE D


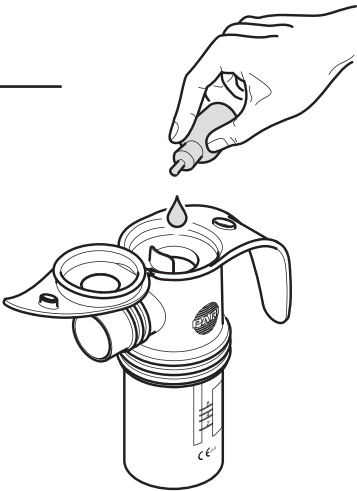


FIGURE E

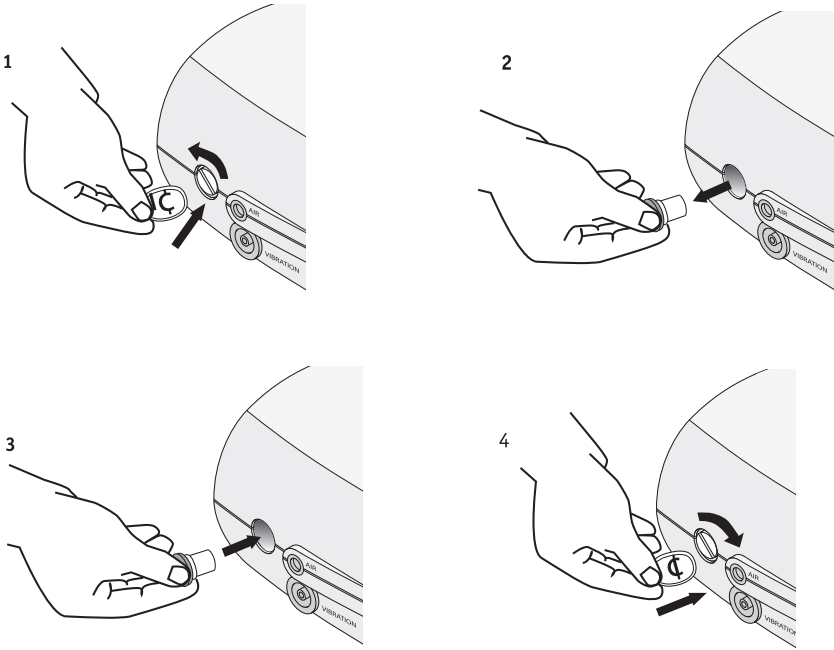

Mode d'emploi

	Page
1 Illustration du nébuliseur PARI LC ^{MD} SPRINT SINUS. . .	1
2 Illustration du compresseur PARI SINUS	2
3 Autres Illustrations	3
4 Introduction	6
5 Mesures de sécurité	6
Mesures de sécurité du compresseur	7
Mesures de sécurité du nébuliseur.	9
6 Démarrage	10
7 Compresseur	11
Assemblage	11
8 Nébuliseur	12
Assemblage	12
Traitement	13
Nettoyage	15
Désinfection et stérilisation	16
9 Compresseur PARI SINUS	17
Entretien.	17
Spécifications	18
Garantie limitée	19
Service d'entretien et de réparation	20

MODE D'EMPLOI DU DISPOSITIF D'ADMINISTRATION PAR AÉROSOL À PULSATION PARI SINUS^{MC}

4. INTRODUCTION

Le présent mode d'emploi contient des renseignements et des mesures de sécurité portant sur le système PARI SINUS.

- Les illustrations d'assemblage du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS se trouvent à **la page 1**.
- Les illustrations d'assemblage du compresseur PARI SINUS se trouvent à **la page 2**.
- Se reporter aux premières pages du présent mode d'emploi pour consulter les illustrations pendant la lecture **des instructions**.

Avant d'utiliser le système PARI SINUS, il faut lire et comprendre le présent **mode d'emploi**. Il faut porter une attention particulière aux mesures de sécurité identifiées DANGER et AVERTISSEMENT. **Conserver ce mode d'emploi pour toute consultation ultérieure.**

5. MESURES DE SÉCURITÉ

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

LIRE LE MODE D'EMPLOI AU COMPLET AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF D'ADMINISTRATION PAR AÉROSOL À PULSATION PARI SINUS.



Mise en garde : Selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur son ordonnance. Ne l'utiliser que lorsqu'il est prescrit par un médecin et qu'avec les médicaments prescrits.

Lire les avertissements et le mode d'emploi soigneusement. Le produit doit être employé exclusivement aux fins auxquelles il se destine, telles que décrites dans le présent mode d'emploi. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures ou maladies graves ou mortelles, nuire à l'efficacité du traitement ou occasionner des dommages matériels.

N'utiliser qu'avec le nébuliseur et le tube PARI LC^{MD} SPRINT SINUS autorisés par PARI pour ce dispositif.

Toujours respecter les mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de produits électriques et médicaux, particulièrement en présence d'enfants, y compris les suivantes :

MESURES DE SÉCURITÉ DU COMPRESSEUR



Pour réduire les risques de blessure grave ou mortelle des suites d'une électrocution, d'un incendie et de brûlures, ainsi que les risques d'endommagement ou de dysfonctionnement de l'appareil :

1. Éviter de placer ou d'entreposer le produit à un endroit où il pourrait être accroché ou tomber dans une baignoire, un évier, de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas placer l'appareil ou l'échapper dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas l'utiliser pendant un bain.
2. Ne pas tenter de saisir un produit tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Il faut le débrancher immédiatement.
3. Toujours débrancher l'appareil après l'avoir utilisé.

1. Avant l'utilisation, vérifier l'étiquette du numéro de série au bas du compresseur PARI SINUS pour s'assurer que la tension et le courant indiqués sur l'appareil correspondent à la tension et au courant disponibles.
2. Ne jamais utiliser l'appareil dans les situations suivantes :
 - *la prise d'alimentation ou le cordon est endommagé;*
 - *l'appareil ne fonctionne pas correctement;*
 - *l'appareil a été échappé ou est endommagé;*
 - *du liquide s'est infiltré dans le boîtier.*

En cas de défectuosité du produit, appeler le service à la clientèle PARI au 1.800.FAST.NEB (327.8632) pour obtenir une évaluation, une réparation ou un remplacement. Consulter **la page 20** pour toute information relative à l'entretien et à la réparation.

3. Éloigner tous les cordons électriques des surfaces chauffées. Éviter de surcharger les prises murales ou d'employer des rallonges électriques.
4. Ne pas utiliser le produit dans un environnement fermé où de l'oxygène est administré, tel qu'une tente à oxygène.
5. Ne jamais échapper ou insérer des objets dans les ouvertures.
6. **Éloigner les liquides de la prise du cordon d'alimentation.**
7. S'assurer que le compresseur PARI SINUS est débranché avant de le nettoyer.
8. Ne pas ouvrir ni démonter le compresseur PARI SINUS. Pour toute question relative à l'entretien et à la réparation, **appeler le service à la clientèle de PARI au 1.800.FAST.NEB (327.8632)**, (faire le « 2 »).
9. N'utiliser que des accessoires autorisés pour le compresseur PARI SINUS. L'utilisation d'accessoires non approuvés risque de compromettre le traitement ou d'endommager le compresseur.

10. Ne jamais vaporiser de liquides sur le boîtier du compresseur. Les liquides peuvent endommager les pièces électriques et mécaniques du compresseur et entraîner le dysfonctionnement de l'appareil. En cas de pénétration de liquide dans l'appareil, appeler PARI au 1.800. FAST.NEB (327.8632).
11. Ne pas utiliser le système PARI SINUS au volant d'un véhicule ou d'équipement lourd.

MESURES DE SÉCURITÉ DU NÉBULISEUR

AVERTISSEMENT

1. Pour réduire le risque de prolifération bactérienne, d'infection, de lésion ou d'affection par contamination : nettoyer et sécher soigneusement les différentes parties du nébuliseur et prendre soin d'essuyer toute trace d'humidité ou de condensation dans le tube après chaque traitement.
2. Il ne suffit pas de nettoyer le nébuliseur après chaque utilisation — il faut le désinfecter ou le stériliser régulièrement entre les traitements pour prévenir les affections graves ou mortelles qui peuvent être causées par la contamination du nébuliseur.
3. Ne jamais utiliser le nébuliseur si la buse est bouchée. En effet, la nébulisation par aérosol sera réduite, altérée ou obstruée ce qui réduira l'efficacité du traitement ou le rendra totalement inefficace. Dans ce cas, remplacer l'appareil par un autre nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS.
4. Une surveillance particulière s'avère nécessaire lorsque ce produit est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant une déficience physique ou intellectuelle. Le patient ne doit pas être endormi ou assoupi.
5. Ce produit contient des pièces de petite taille qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants. Le tube présente également un risque d'étranglement. **LE TRAITEMENT D'UN ENFANT DOIT TOUJOURS AVOIR LIEU SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. NE PAS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE PENDANT L'ADMINISTRATION DU TRAITEMENT.**

6. Avant l'utilisation, vérifier que le nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS est bien assemblé. Les différentes pièces doivent être bien mises en place. Un mauvais assemblage du nébuliseur peut gêner ou empêcher l'administration efficace d'aérosol et réduire l'efficacité du traitement.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

6. DÉMARRAGE

Indications : *Le dispositif d'administration par aérosol à pulsation PARI SINUS est un système à compresseur et à nébuliseur, conçu afin d'aérosoliser les médicaments approuvés pour la nébulisation et prescrits par un médecin pour l'administration dans les voies respiratoires supérieures. Le dispositif PARI SINUS est destiné aux patients adultes et pédiatriques dont le traitement indiqué est un médicament en aérosol au domicile, à l'hôpital et dans les institutions pour maladies subaiguës.*

Contre-indications : *Bien qu'aucune contre-indication à l'utilisation de la thérapie par pression positive expiratoire n'ait été signalée, il faut évaluer soigneusement les éléments suivants avant de prendre la décision d'entamer la thérapie : une incapacité à tolérer un travail ventilatoire accru; une pression intracrânienne supérieure à 20 mm Hg; une instabilité hémodynamique; une chirurgie faciale, orale ou crânienne récente; une sinusite aiguë; une épistaxis; une chirurgie œsophagienne; une hémoptysie active; de la nausée; une rupture avérée ou présumée de la membrane du tympan ou toute autre pathologie de l'oreille moyenne et tout pneumothorax non traité.*

1. Vérifier le contenu de la boîte pour s'assurer que tous les éléments de base du système PARI SINUS sont inclus.
 - Compresseur PARI SINUS
 - Cordon d'alimentation
 - Trousse à nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS
 - Tube double PARI SINUS
 - Mode d'emploi du système PARI SINUS

Si la boîte ne contient pas tous les éléments énumérés, contacter le service à la clientèle de PARI. Certains modèles peuvent inclure des accessoires supplémentaires.

2. Il est toujours souhaitable d'avoir un nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS supplémentaire et un filtre à air pour compresseur PARI SINUS supplémentaire en tout temps. On peut en avoir besoin si des pièces sont perdues, endommagées ou salies.

POUR OBTENIR DES TROUSSES À NÉBULISEUR DE RECHANGE, communiquer avec un distributeur PARI autorisé ou appeler le service à la clientèle de PARI au 1.800.FAST.NEB ou encore visiter le site www.pari.com.

7. COMPRESSEUR

Le traitement est plus efficace lorsque les voies nasales sont dégagées. Avant d'entamer la thérapie, vérifier que le nez est dégagé, par exemple en le rinçant à l'aide d'un appareil d'irrigation nasale ou en le mouchant.

ASSEMBLAGE DU COMPRESSEUR : Voir l'illustration 2

Placer le compresseur PARI SINUS sur une surface plane et stable et procéder comme suit, conformément à l'illustration 2 de la page 2.

1. Insérer le cordon d'alimentation (9) dans la prise du cordon d'alimentation (11) située à l'arrière de l'appareil, puis dans une prise de courant murale.
2. Dérouler le tube. Insérer le raccord mâle de l'un des tubes dans l'orifice du compresseur désigné « AIR » (15) en tournant légèrement.
Consulter la Figure A à la page 3.
3. Insérer le raccord femelle de l'autre tube dans l'orifice de sortie du compresseur désigné « VIBRATION » (14) en tournant légèrement.
Consulter la Figure B à la page 3.

8. NÉBULISEUR

ASSEMBLAGE DU NÉBULISEUR : Voir l'illustration 1

Remarque : Le nébuliseur n'est pas stérile.


1. Vérifier que le nébuliseur a été nettoyé et/ou désinfecté avant la première utilisation et après le dernier traitement de la journée. Consulter la section « Nettoyage et désinfection du nébuliseur » à la page 14.
2. Ouvrir la valve inspiratoire en soulevant le bouchon à charnière.
Consulter la Figure C à la page 3.
3. Verser le médicament prescrit dans le bocal du nébuliseur. **Consulter la Figure D à la page 4.** Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximal. **Mise en garde :** Le remplissage maximal de médicament pour le système PARI LC^{MD} SPRINT est de 8 cm³ (ml).
4. Refermer la valve inspiratoire en appuyant sur le bouchon à charnière.
5. Insérer l'adaptateur nasal (5) dans le coude (6), puis insérer l'autre extrémité dans l'orifice de sortie du nébuliseur.
6. Tenir le nébuliseur en position verticale.
7. Insérer le raccord male du tube de vibration (7) dans le raccord de vibration (3).
8. Brancher l'adaptateur femelle du tube d'air (8) dans l'entrée d'air située au bas du bocal du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS en tournant légèrement.
9. Pour le déposer, insérer le nébuliseur dans le support fourni à cet effet sur le compresseur.

TRAITEMENT

1. Suivre le traitement tel qu'indiqué par le médecin ou le professionnel de la santé.
2. S'asseoir en position droite et détendue et tenir le nébuliseur à la verticale.
3. Insérer doucement l'adaptateur nasal (5) dans une narine afin de bien l'obstruer. Insérer le bouchon nasal souple (4) dans l'autre narine. Il restera en place une fois inséré. Consulter la Figure F ci-dessous. Le bouchon nasal souple a une petite ouverture afin d'assurer une résistance définie.

MISE EN GARDE : Ne pas obstruer les petites ouvertures du bouchon nasal pendant le traitement.

FIGURE F

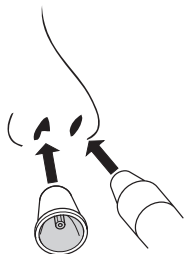

4. Fermer les voies respiratoires inférieures. **Voir ci-dessous pour obtenir des conseils afin de bloquer les voies respiratoires inférieures.**

Conseils pour bloquer les voies respiratoires inférieures :

- Inspirer et commencer à prononcer la lettre « K » Faire une pause pendant la prononciation du son pour que la langue reste appuyée contre l'arrière du palais. Maintenir la position durant 8 à 10 secondes ou jusqu'à une sensation d'inconfort. Inspirer, expirer, puis poursuivre le traitement.
- Une autre façon de bloquer les voies respiratoires inférieures est d'inspirer puis d'appuyer la langue contre l'arrière du palais et de maintenir cette position pendant 8 à 10 secondes ou jusqu'à une sensation d'inconfort. Inspirer, expirer, puis poursuivre le traitement.

TEST : SI LE PATIENT N'ARRIVE PAS À INSPIRER OU À EXPIRER PENDANT CETTE MANŒUVRE, LA PROCÉDURE EST RÉUSSIE.

Vérifier la technique appropriée.

Les voies respiratoires inférieures sont bloquées lorsque le bord de la narine dans laquelle le bouchon nasal (4) est inséré vibre légèrement et que l'air s'échappe par l'ouverture du bouchon nasal.

5. Allumer le compresseur.


6. L'aérosol est administré automatiquement dans les sinus paranasaux. Au cours du traitement, il ne faut pas inspirer ni expirer par le nez ou la bouche. Au besoin, faire de courtes pauses durant lesquelles respirer normalement par le nez ou la bouche.

- Après la pause de respiration, obstruer de nouveau les voies respiratoires inférieures et poursuivre la thérapie telle que décrite ci-dessus.

Si la résistance à la pression est trop élevée pendant l'utilisation du bouchon nasal souple : Pour réduire la pression si une sensation de résistance durant le traitement devient désagréable ou trop intense, il faut procéder comme suit **(voir Figure G) :**

- Cesser le traitement et retirer le bouchon nasal souple de la narine.
- Faire sortir l'intérieur du bouchon nasal, puis couper la pointe à la marque indiquée à l'aide d'une paire de ciseaux.
- **Ne pas oublier de replacer l'intérieur du bouchon.**

FIGURE G

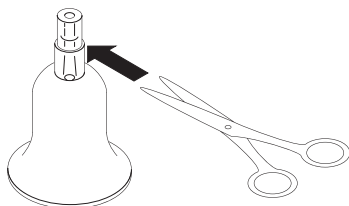

7. Accorder la même durée de traitement aux deux narines : à savoir au moins 2,5 minutes pour chaque narine. Le traitement est terminé lorsque le nébuliseur se met à tousser.

Pour assurer la réussite de la thérapie, il est essentiel que l'adaptateur nasal et le bouchon nasal soient bien insérés et que les voies respiratoires inférieures soient fermées.

NETTOYAGE DU NÉBULISEUR PARI LC^{MD} SPRINT SINUS

1. Débrancher le tube d'air (8) de l'entrée d'air au bas du bocal du nébuliseur et le tube de vibration (7) du raccord de vibration (3).
2. S'il y a de l'humidité (condensation) dans le tube, laisser tourner le compresseur PARI SINUS pendant 2 à 3 minutes en ne laissant que le tube raccordé au compresseur. L'air chaud du compresseur PARI SINUS séchera le tube. Ou encore, faire sécher le tube en le retirant du compresseur PARI SINUS et en le suspendant avec les extrémités vers le bas pour laisser toute humidité ou condensation s'échapper et s'évaporer. Utiliser un chiffon humide propre pour essuyer l'extérieur du tube.
3. Désassembler les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS tel qu'indiqué à l'illustration 1.
4. Nettoyer toutes les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS avec de l'eau tiède et du savon liquide à vaisselle. **NE PAS LAVER LE TUBE.**
5. Rincer soigneusement les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS à l'eau tiède et secouer l'excédent d'eau.
6. Sécher les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS à l'air ou à la main sur un chiffon propre non pelucheux. Réassembler le nébuliseur lorsque toutes les pièces sont sèches, puis l'entreposer pour un usage ultérieur.
7. Les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS peuvent également être nettoyées sur le plateau supérieur d'un lave-vaisselle. **NE PAS LAVER LE TUBE.** Mettre les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS dans le panier du lave-vaisselle, puis placer le panier sur le plateau supérieur du lave-vaisselle. Retirer les pièces et les sécher lorsque le lave-vaisselle termine son cycle de lavage.



POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INFECTION

1. Nébuliseur destiné à un usage pour un patient unique (une seule personne). Ne pas partager le nébuliseur avec d'autres.
2. Il faut désinfecter ou stériliser régulièrement le nébuliseur. Le défaut de ce faire risquerait d'occasionner une maladie grave, voire mortelle.

POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE FIBROSE KYSTIQUE, LA FONDATION DE LA FK RECOMMANDE DE FAIRE BOUILLIR LES PIÈCES PENDANT UN BON 10 MINUTES POUR LES DÉSINFECTER.

DÉSINFECTION ET STÉRILISATION DU NÉBULISEUR PARI LC^{MD} SPRINT SINUS

1. Nettoyer le nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS tel qu'indiqué à la section **Nettoyage du nébuliseur à la page 14**. Pour une légère désinfection aux deux jours de traitement, tremper toutes les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS dans une solution d'une mesure de vinaigre blanc distillé pour trois mesures d'eau de robinet chaude pendant une heure. **NE PAS TREMPER LE TUBE**. On peut substituer un désinfectant pour équipement respiratoire commercial (comme le Control III^{MD}) au vinaigre blanc distillé en suivant les instructions de mélange du fabricant.
2. Rincer soigneusement toutes les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS à l'eau de robinet tiède et les sécher à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux. Jeter la solution de vinaigre lorsque la désinfection est terminée.
3. On peut également désinfecter les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS (sauf le tube) en les faisant bouillir dans un chaudron propre pendant dix minutes. Les hôpitaux et les cliniques peuvent stériliser les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS (sauf le tube) en autoclave (un maximum de 136 °C ou 277 °F) en suivant les instructions du fabricant de l'autoclave. Sécher les pièces du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS à l'air ou à la main sur un chiffon propre non pelucheux.

CONTROL III^{MD} EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE MARIL PRODUCTS, INC.

9. COMPRESSEUR PARI SINUS

ENTRETIEN

FILTRE À AIR : Lorsqu'il est neuf, le filtre à air du panneau avant du compresseur PARI SINUS est d'un blanc éclatant. Au fil du temps, le filtre à air devient gris auquel moment il faut le remplacer. Le filtre doit être remplacé immédiatement s'il devient humide ou obstrué. Le filtre à air a une durée utile de 500 heures avant d'avoir à être remplacé. En règle générale, il faut remplacer le filtre à air lors du remplacement du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS (c'est-à-dire aux six mois). Pour retirer le filtre à air, s'assurer que le nébuliseur PARI SINUS est éteint. Utiliser une pièce de monnaie pour retirer le couvercle du filtre à air en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **Consulter la Figure E à la page 4.** Mettre un nouveau capuchon et filtre (déjà assemblé) dans le panneau avant du compresseur et utiliser une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, tel qu'illustré à **la Figure E à la page 4.**

REMARQUE : Ne pas laver ni réutiliser les filtres à air. Ne pas utiliser du matériel de filtre à air d'un autre fournisseur, cela risquerait d'endommager le compresseur.

NETTOYAGE DU BOÎTIER DU COMPRESSEUR PARI SINUS : Utiliser un chiffon humide propre pour essuyer l'extérieur du boîtier du compresseur PARI SINUS. Veiller à ne pas verser de liquide dans la prise de courant pour ne pas endommager l'appareil.



Avant de procéder au nettoyage, éteindre le compresseur et retirer le cordon d'alimentation de la prise de courant murale. Ne pas tirer sur le cordon pour retirer la fiche de la prise de courant.

ENTRETIEN ET RÉPARATION Ne jamais utiliser le compresseur PARI SINUS s'il est mal ou incomplètement assemblé, ou endommagé. N'utiliser que des pièces, des accessoires et des tubes PARI d'origine autorisés par PARI pour le système PARI SINUS. L'utilisation d'autres pièces, accessoires ou tubes risque d'endommager le compresseur PARI SINUS. Cela annulera la garantie. Le service d'entretien et de réparation doit être exécuté par un centre de service PARI agréé.

REMARQUE : Le compresseur PARI SINUS ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'entretien ou la réparation exécuté par une personne autre qu'un centre de service PARI agréé annule la garantie.

SPÉCIFICATIONS DU DISPOSITIF D'ADMINISTRATION PAR AÉROSOL À PULSATION PARI SINUS

- Poids : (Compresseur seulement) 1,8 kg (4 lb)
- Dimensions : (Compresseur seulement) 14,6 cm x 19,0 cm x 14,0 cm (5,75 x 7,5 x 5,5 po)
- Alimentation : 0,120V CA, 60 Hz, 1,9A
- Puissance : 85 W

Fonctionnement ambiant :

- Plage de températures : 10°C à 40°C (50°F à 104°F)

Transport/entreposage :

- Température ambiante : -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)
- Humidité : 10 % à 100 %
- Pression atmosphérique : 500 hPa à 1 060 hPa

Légende :

- ARRÊT/MARCHE
- MISE EN GARDE/AVERTISSEMENT
- Courant alternatif
- Classe de protection des pièces utilisées : Type B
- Dispositif de classe de protection II
- Dispositif d'administration par aérosol PARI



Type 028

GARANTIE LIMITÉE DU COMPRESSEUR PARI SINUS

PARI offre une garantie limitée standard de trois (3) ans sur le compresseur PARI SINUS. La période de garantie sera inscrite sur l'étiquette du numéro de série située en dessous du compresseur. PARI garantit le compresseur PARI SINUS et ses différentes pièces contre tout vice de fabrication ou de matériel pour une période de trente-six (36) mois à compter de la date du premier achat de l'équipement. Cette garantie ne couvre pas les défaillances touchant le nébuliseur, la tubulure ou les accessoires. La présente garantie ne s'applique pas aux défaillances résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'abus, d'une altération, du recours à un centre d'entretien, à des pièces ou à des solutions de nettoyage non autorisés, de même qu'aux défaillances causées par le non-respect du guide d'utilisation. En cas de défaillance de l'équipement garanti durant la période de garantie, PARI, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera l'équipement ou les pièces endommagées, sous réserve du bien-fondé de la demande. L'acheteur a la responsabilité d'emballer et de retourner l'équipement de manière à éviter tout dommage durant l'envoi. Le dispositif doit être envoyé port payé à PARI Respiratory Equipment, Inc. La présente garantie couvre le coût de la main-d'œuvre engagé pour le retrait ou le remplacement des pièces garanties dans un centre d'entretien PARI autorisé uniquement. Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie, aviser le centre d'entretien **autorisé en appelant le service à la clientèle de PARI au 1.800.FAST.NEB (327.8632), puis sélectionner le " 2 "**.

IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES AU COMPRESSEUR PARI SINUS, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE STIPULÉE DE TRENTE-SIX (36) MOIS À COMPTER DE LA DATE DU PREMIER ACHAT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES SUR D'AUTRES PIÈCES, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT EXONÉRÉES. Certains États ne permettent pas les limitations de temps stipulées pour les garanties implicites. Ainsi, dans ces États, ces restrictions ou exclusions ne s'appliquent pas. Le seul et exclusif recours en vertu de cette garantie est de réparer ou de remplacer le PARI SINUS et (ou) ses pièces à la discrétion de PARI. EN AUCUN CAS PARI NE SERA TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS À L'ACHETEUR OU À UNE TIERCE PARTIE QUELCONQUE, Y COMPRIS,

SANS POURTANT S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE PERTES DE PROFITS, PERTES D'OCCASION D'AFFAIRES, PERTES DE BIENS, PERTES ÉCONOMIQUES OU DOMMAGES LÉGAUX OU DOMMAGES- INTÉRÊTS EXEMPLAIRES, PAR NÉGLIGENCE, GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT. Certains États n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects. Ainsi, dans ces États, ces restrictions ou exclusions ne s'appliquent pas. Cette garantie donne des droits spécifiques à l'acheteur. Il peut également avoir d'autres droits ou garanties juridiques selon l'État où il vit.

SERVICE ET RÉPARATION

Pour toute question concernant le système de traitement sinusal PARI SINUS :

1. Communiquer **avec le service à la clientèle de PARI en composant le numéro sans frais (É.-U.) 1.800.FAST.NEB (327.8632)**, puis en sélectionnant le " 2 ".
2. Par écrit, décrire la nature de la panne ou des symptômes du compresseur PARI SINUS. Indiquer vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone où vous joindre pendant la journée. Dans le cas du nébuliseur PARI LC^{MD} SPRINT SINUS, nettoyer, désinfecter et (ou) stériliser le dispositif avant de l'envoyer. Sécher le nébuliseur et mettre celui-ci dans un sac plastique.
3. Envoyer la description écrite et le compresseur PARI SINUS dans un emballage protégé à l'adresse fournie par le service à la clientèle de PARI.

Pour obtenir des pièces et des accessoires de remplacement, appeler le service à la clientèle de PARI au 1.800.FAST.NEB, ou visiter le site www.pari.com.

BREVET EN INSTANCE

028D0025 RÉV. A 7/10



PARI RESPIRATORY EQUIPMENT, INC.
2943 Oak Lake Blvd. Midlothian, VA 23112-3998
1.800.FAST.NEB (327.8632)
Tel 1.804.253.PARI (7274) Fax 1.800.727.4112

www.PARI.com
E-mail ProductInfo@PARI.com
Respiratory CEU programs available
© 2008 PARI Respiratory Equipment, Inc.



