


PARI SMARTMASK® pour enfant

Utiliser uniquement avec les appareils à système eFlow®

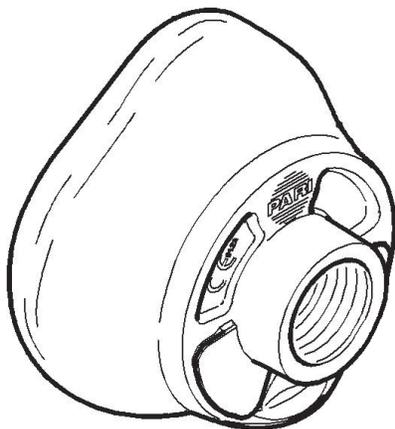

Pièce no 078F5000



BREVET NO :
7,255,106B2

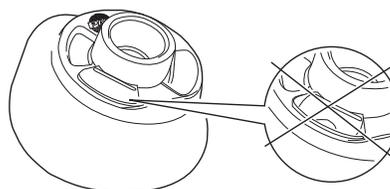


Fig. A

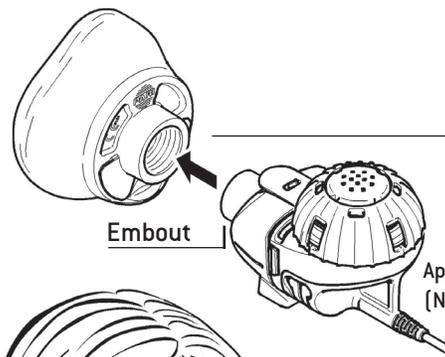


Fig. B



Fig. C

⚠ AVERTISSEMENT

1. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser ce masque avec un appareil à système eFlow. Conservez ces instructions pour toute consultation future.
2. Le masque PARI SMARTMASK® (SMARTMASK) pour enfant doit toujours être utilisé avec l'appareil à système de nébuliseur eFlow. Par conséquent, il faut également suivre le mode d'emploi de ce produit. Plus spécifiquement, toutes les instructions concernant le nettoyage et la désinfection de l'appareil à système eFlow s'appliquent également au SMARTMASK pour enfant.

Utilisation prévue

Le SMARTMASK pour enfant est un accessoire pour les enfants de 2 ans et plus qui ne peuvent ou ne veulent pas inhaler par une embouchure.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter le risque que l'enfant ne reçoive pas assez d'oxygène, le masque ne peut être utilisé auprès d'enfants de moins de 2 ans.

Utilisation du masque

Figure A : Assurez-vous que les valves du masque sont alignées avec les bords extérieurs des ouvertures. En aucun cas, elles ne doivent être enfoncées.

Figure B : Insérez l'embout de l'appareil à système eFlow dans le masque.

Figure C : Pour le traitement le plus efficace possible, maintenez l'appareil droit, comme illustré à la figure C.

⚠ MISE EN GARDE

1. Le SMARTMASK pour enfant ne peut être utilisé auprès d'un enfant qui est couché ou endormi.
2. Pour éviter une perte d'aérosol, assurez-vous que le masque adhère hermétiquement à la peau.

Ce produit peut être uniquement utilisé avec les appareils suivants :

1. Nébuliseur électronique TRIO®
2. Système de nébuliseur ALTERA®
3. Système de nébuliseur eRapid®
4. Système de nébuliseur eFlow® expérimental

Fabriqué en Allemagne pour :

PARI Respiratory Equipment, Inc.
2412 PARI Way
Midlothian, Virginia 23112 États-Unis

Service à la clientèle :

1-866-335-6943
www.pari.com