


# PARI SMARTMASK® pour bébé

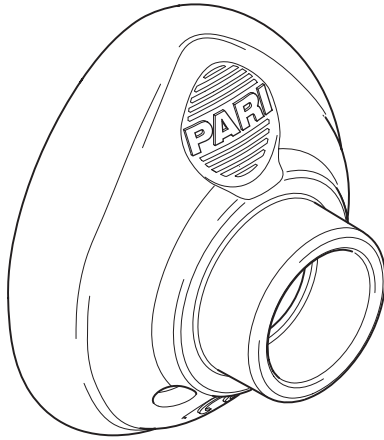

Utiliser uniquement avec les appareils à système eFlow®

Pièce no 078F5024



BREVET NO:  
7,255,106B2

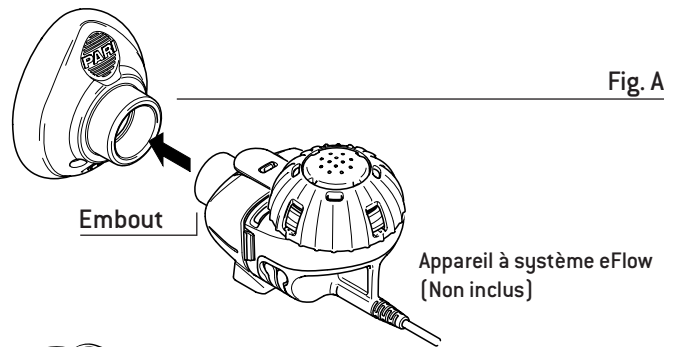


Fig. A

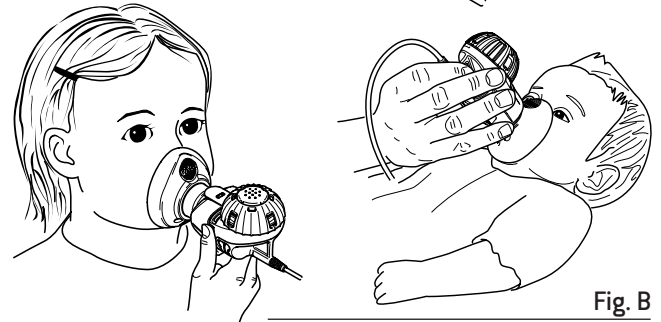


Fig. B

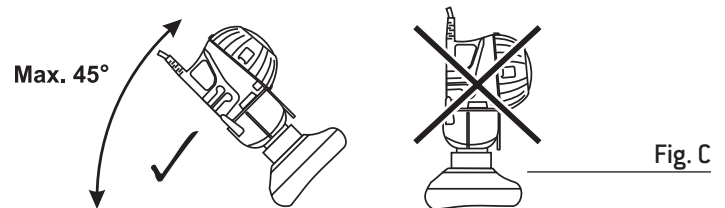


Fig. C

## ▲ AVERTISSEMENT

1. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser ce masque avec un appareil à système eFlow. Conservez ces instructions pour toute consultation future.
2. Le masque PARI SMARTMASK® (SMARTMASK) pour bébé doit toujours être utilisé avec le système de nébuliseur eFlow. Par conséquent, il faut également suivre le mode d'emploi de ce produit. Plus spécifiquement, toutes les instructions concernant le nettoyage et la désinfection de l'appareil à système eFlow s'appliquent également au SMARTMASK pour bébé.

## Utilisation prévue

Le SMARTMASK pour bébé est un accessoire d'inhalation par masque pour les enfants de plus de 2,7 kg (6 lb), jusqu'à l'âge de deux ans.

## ▲ MISE EN GARDE

Pour un fonctionnement optimal, le masque doit couvrir complètement les deux coins de la bouche et le nez.

## Utilisation du masque

**Figure A :** Placez le masque sur le raccord de l'aérochambre du nébuliseur eFlow.

**Figure B :** Positionnez le masque pour qu'il soit scellé hermétiquement par-dessus la bouche et le nez.

**Figure C :** N'inclinez pas le nébuliseur eFlow à plus de 45°, puisqu'à partir de cet angle, le médicament ne pourra pas être complètement nébulisé.

## ▲ MISE EN GARDE

1. Le SMARTMASK pour bébé ne peut être utilisé auprès d'un enfant en bas âge qui est couché ou endormi.
2. Pour éviter une perte d'aérosol, assurez-vous que le masque adhère hermétiquement à la peau.

Ce produit peut être uniquement utilisé avec les appareils suivants :

1. Nébuliseur électronique TRIO®
2. Système de nébuliseur ALTERA®
3. Système de nébuliseur eRapid®
4. Nébuliseur Zirela®
5. Système de nébuliseur eFlow® expérimental

Fabriqué en Allemagne pour :

PARI Respiratory Equipment, Inc.  
2412 PARI Way  
Midlothian, Virginia 23112 États-Unis

Service à la clientèle :

1-866-335-6943  
www.pari.com

© 2016 PARI Pharma GmbH. Tous droits réservés. Le logo de PARI Pharma est une marque déposée de PARI GmbH. Altera, eFlow, PARI SMARTMASK, TRIO, eRapid et Zirela sont des marques déposées de PARI Pharma GmbH.  
078D0202 Rév. B 04/16